



 **大王製紙株式会社**

〒102-0071 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

<https://www.elleair.jp>

アテントホームページ ~病院・施設様専用サイト~

ホームページから、商品サンプル・資料請求が可能です!

<https://www.elleair.jp/hospital-attento/>



Spring 2025 Vol.35

## 医療・福祉施設向け商品カタログ



## 会社概要

社名 大王製紙株式会社  
<https://www.daio-paper.co.jp>  
 本社 ■ 四国本社 愛媛県四国中央市三島紙屋町2-60  
 ■ 東京本社 東京都千代田区富士見二丁目10番2号  
 設立 1943年(昭和18年)5月5日  
 資本金 539億円(2024年3月31日現在)  
 代表者 代表取締役社長 若林 頼房

事業内容 (1) 紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに販売  
 (2) 日用品雑貨の製造加工並びに販売 ほか  
 事業所 ■ 主要工場 三島工場(愛媛県、<sup>カニ</sup>可児工場(岐阜県)  
 ■ 支店 他 大阪、名古屋、福岡  
 ■ 海外事業所 中国、タイ、インドネシア、韓国、アメリカ、チリ ほか  
 主要製品 新聞用紙、印刷用紙、包装用紙、板紙、段ボール、パルプ、衛生用紙、紙おむつ、フェミニンケア用品、ウエットワイブ 他

## 事業内容 2024年3月期連結売上高 6,717億円(億円未満四捨五入)

### 紙・板紙事業

紙・板紙事業では、国内屈指の臨海工場であり、且つ多様なパルプと紙を生産できる三島工場(愛媛県)の強みと特徴を生かし、市場動向に対応した生産・販売品種のシフトを進めるとともに、同工場を中心としたグループ工場が一体となり、生産性向上やエネルギー費削減等の技術・情報を共有し収益に変える活動により、コスト低減を進めています。


2024年3月期連結売上高 **3,553**億円  
 (億円未満四捨五入)

段ボール原紙 新聞用紙  
 機能材 情報用紙  
 印刷・出版用紙 包装用紙

### ホーム&パーソナルケア事業

ホーム&パーソナルケア事業では、国内においては、全てのカテゴリで品揃えの充実と生活者ニーズや使用シーンに対応した高付加価値商品を開発・上市することにより、市場の深耕を進めてきました。海外においては、ベビー用紙おむつの需要が急拡大するアジア諸国に対し、日本からの輸出版売と中国・タイ・インドネシアでの現地生産・販売により事業拡大を進めています。今後は展開エリアを拡大することで点から面での販売活動にシフトを行うとともに、ベビー用紙おむつを販売するエリアで大人用紙おむつや高付加価値紙製品の展開につなげることで、立体的な事業活動を推進しています。

2024年3月期連結売上高 **2,931**億円  
 (億円未満四捨五入)

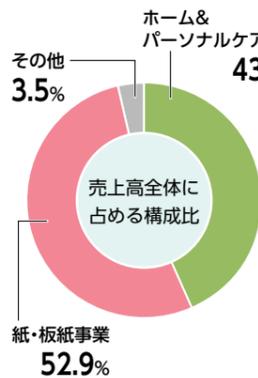

### その他

2024年3月期  
 連結売上高  
**233**億円  
 (億円未満四捨五入)

## CONTENTS

| アテントからのご提案  |    | 商品の案内         | アテントからのご提案           |    |
|-------------|----|---------------|----------------------|----|
| 大人用紙おむつの品揃え | 03 |               | 中人用品(大人用とベビー用の中間サイズ) | 25 |
| 介護用品        | 06 | ハウスホールドケア用品   | 26                   |    |
| 洗浄液         | 11 | 業務用紙製品        | 27                   |    |
| 清拭用品        | 22 | 商品規格一覧        | 28                   |    |
| 介護用品・吸水ケア用品 | 23 | 新商品・リニューアル品一覧 | 37                   |    |
|             | 24 |               |                      |    |

# 医療・介護現場で必要な商品を幅広くご提供します

大人用紙おむつの他にも感染対策でも使用可能な衛生商品の豊富な品揃えで、**業務負担軽減**や**安心安全な環境づくり**をサポートします。

アテントでは、**ALL IN ONE**で商品をご提案します。

- **ALL IN ONEサービスとは**  
 病院・施設様で必要な商材を1ブランド(エリエール)で提供させていただくサービスです。
- **メリット…**
  1. おむつ、紙製品、マスクなどの一括提案によるBCP対策
  2. 発注の一本化による職員様の業務負担軽減

アテントでは非接触でのご提案・サポート体制を整えています。

- **オンラインでの商談・勉強会**  
 ZOOM・Teamsを活用してリモート対応



あて方 動画



iPad貸出も実施

- **おむつ診断書の活用**  
 課題を記入して私たちへお渡し下さい!  
 改善提案をさせていただきます!



担当営業へお気軽にお声がけ下さい。



# 介護の快護化

KAIGOKA



## 皆さまと一緒に「介護の快護化®」を目指します。

※「介護の快護化」登録商標 6600998号

アテントは、介護する人・うける人、それを支えるご家族まで、「安心」で「快適」に「自己実現」できる排泄ケアをサポートします！



介護の快護化

アテントでは「介護の快護化」の実現を目標としています。介護をする人、介護をうける人、そしてそれを支えるご家族まで。それぞれの抱えるお悩みや課題に寄り添い、解決策をご提案することで

介護に携わるすべての人が、もっと安心して快適に日々を過ごせるような。明日へと広がる新たな可能性に、自分から一歩前に踏み出せるような。

そんな「快護」となるように、介護のカタチを変えていきたいという想いです。そして、この想いを広げ、共感の輪をつないでいきたいと願っています。

### 安心で快適を追求した「S ケア、R ケアシリーズ」



#### Sケアシリーズ

スキントラブル発生リスク軽減へ  
「Sケアシリーズ」は「紙おむつが影響するスキントラブル発生リスク」軽減を目指します。

- 1 Skin care の「S」  
スキンケアに注目の品質
- 2 Soft/Smooth の「S」  
やわらかい、なめらかな品質
- 3 Solution/Satisfaction の「S」  
利用者・介護者の抱える問題を解決し、顧客満足度を向上させる品質



#### Rケアシリーズ

動きによるモレ軽減  
「Rケアシリーズ」は動きによるモレを軽減することで「自分らしさを実感」し、日常生活を快適に過ごしていただくお手伝いをします。

- 1 Rehabilitation の「R」  
「機能回復」「残存機能維持」を支える品質
- 2 Regain の「R」  
「自分らしさ」を取り戻すことを支える品質
- 3 Respect の「R」  
「自分らしさ」を尊重する品質



#### 産学連携商品

大学と共同で取り組み、科学的根拠に基づいた商品を開発しています。スキントラブルや使用状況の問題点などの課題を分析し、導き出された共同研究成果を活用して、課題解決を目指しています。



### Attento History

アテントはこれからも「快護」に向けて、商品やサービスでサポートしていきます。

1980 アテント発売 (P&G)

2000 介護保険制度創設  
個別ケアの重要視

1993 テークケア  
テークケア発売 (大王製紙)

2007 アテント事業取得

2005

Sケアシリーズ  
Sケアシリーズ発売  
「スキントラブル発生リスク」軽減を目指してのご提案

2008 Rケアシリーズ  
Rケアシリーズ発売  
「動きによるモレ」軽減のご提案

2022



介護の快護化  
新スローガン  
「介護の快護化」

## 3回交換でのご利用者様の快適化提案

アテントではおむつの交換回数削減による、ご利用者様の快適性向上と職員様の業務負担軽減をご提案いたします。

- メリット**
- ◆ご利用者様…おむつ交換による夜間覚醒をなくし安眠の確保、翌日の活動意欲向上とQOLの向上。
  - ◆職員様…業務負担の軽減によるケアに関わる時間の創出、ケアの質向上。

【交換パターン例】 Rケアスーパーフィットテープ+Sケア夜1枚安心パッドシリーズ



Rケアスーパーフィットテープ

Sケア長時間安心/夜1枚安心パッドシリーズ



- からだぴったりテープ(伸縮)
- 脚ひたフィットゾーン
- 脚まわりぐるっとギャザー



パッドはご利用者様の排尿量・交換タイミングに合わせて、お選びいただけます。



パンツをご利用の方も、夜用パンツを活用して3回交換の実施が可能です！ご興味ございましたら、お気軽に営業担当にお声がけください！

## 【Sケアシリーズ】スキントラブル発生リスク軽減におすすめの商品 Sケアシリーズの中でも産学連携商品をご紹介します


石川県立看護大学 学長 / 東京大学 名誉教授  
真田弘美先生 共同研究成果を活用

### アテント Sケア 軟便安心パッド



・水様便・泥状便の肌への付着を軽減したい方

軟便を下層へ落とし吸収効率改善、水様便モレ・皮膚への付着を低減

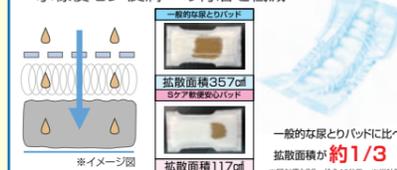


### アテント Sケア 前側吸収 おしりさらさらパッド



・尾骨・仙骨付近への尿の付着を軽減したい方

おしり側への尿拡散を軽減し、湿潤によるおしりへの肌刺激を低減

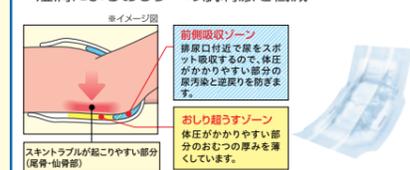

鳥取大学医学部附属病院  
共同研究成果を活用

### アテントSケア 長時間安心パッド ダブルブロックタイプ



・男性巻きのパッドが外れやすい方  
・座位・側臥位時のあふれモレでお困りの方

ダブル立体ギャザーで尿をせき止めず、しっかりキャッチ、モレ防止



## 【Rケアシリーズ】動きによるモレ軽減におすすめの商品

### アテント Rケア スーパーフィットテープ



・体動時のズレやすき間モレが気になる方

・伸縮ウエストテープで身体の動きにおむつが追従



### アテント Rケア うす型 スーパーフィットパンツ



・歩行時のすき間からのモレが気になる方

・フィット性が高くモレ防止  
・あてやすく装着時間の短縮



### アテント Rケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ



・パンツにパンツ用パッドを併用しているとパッドのズレやすき間モレが気になる方

・モレやすい座位にも安心の「超フィット立体ギャザー」で動いても脚まわりにフィットしてモレを軽減



# ～社会で支える「地域共生社会」への実現に向けた取り組み～

～アテントはSDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます～



アテントは「介護の快護化」®に向けてすべての人に健康と福祉が提供できる、住み続けられるまちづくりを目指し、病院施設様とパートナーとして排泄ケアのお取組みを実践しております。

## ～「地域共生社会」実現を目指したアテントの取り組み～


### ●アテントマスターの取り組み

アテントの紙おむつの適切な使い方や排泄についてのアドバイス・提案サポートについての知識を習得し、患者様・利用者様の排泄ケアに活かしていただくために、アテントが認定している独自の資格です。



アテントマスターは総計9,848名の方に取得いただいています。(2024年12月現在)

アテントマスター取得実績推移・目標(名)

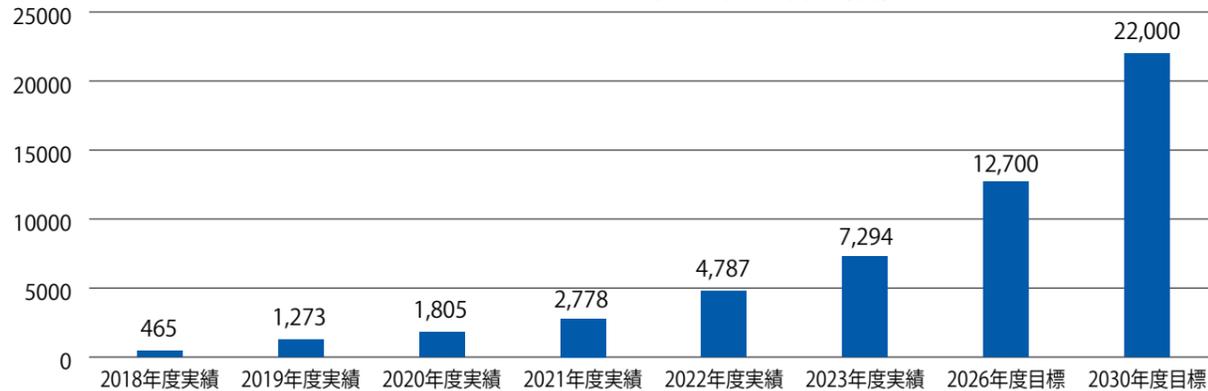

### ●認知症サポートキャラバンパートナー企業



近年増加傾向にある認知症の方々が安心して暮らせる社会を目指し、アテントは認知症サポートキャラバンに賛同しています。



大王製紙株式会社

### ●冊子「アテント選び方・使い方ハンドブック」

おむつの選び方・基本のあて方を、カラーで見やすくまとめた冊子です。



ホームページにて公開中!  
「アテント選び方・使い方  
ハンドブック」は  
こちらから→



### ●大人用おむつのあて方動画

テープ・パンツのあて方を公開中です。



テープ止め



Rケア  
スーパーフィット  
テープ



Rケアうす型  
さらさらパンツ

# 大人用紙おむつの品揃え

## アウター

### パンツタイプ

| 商品名                     | ウエストまわり   | 製品 | サイズ前後見分け           | パッケージ | 詳細ページ |
|-------------------------|-----------|----|--------------------|-------|-------|
| Rケア<br>うす型さらさらパンツ       | 男女共用 S    |    | カラム<br>※M-Lサイズの場合  |       | 11    |
|                         | 男女共用 M~L  |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                         | 男女共用 L~LL |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
| Rケアうす型<br>スーパーフィットパンツ   | 男女共用 M~L  |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 11    |
|                         | 男女共用 L~LL |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
| 長時間さらさらパンツ              | 男女共用 S    |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 13    |
|                         | 男女共用 M~L  |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                         | 男女共用 L~LL |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
| 夜1枚安心パンツ<br>パッドなしですっと快適 | 男女共用 M    |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 13    |
|                         | 男女共用 L    |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |

### テープ止めタイプ

| 商品名                | ヒップサイズ | 製品 | サイズ見分け             | パッケージ | 詳細ページ |
|--------------------|--------|----|--------------------|-------|-------|
| Rケア<br>スーパーフィットテープ | S      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 14    |
|                    | M      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                    | L      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
| テープ止めタイプ           | S      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 14    |
|                    | M      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                    | L      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                    | LL     |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
| 背モレ・横モレも防ぐ<br>テープ式 | S      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       | 13    |
|                    | M      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                    | L      |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |
|                    | LL     |    | カラム<br>※L-LLサイズの場合 |       |       |

# 大人用紙おむつの品揃え インナー

## パッドタイプ

| 商品名               |                            | サイズ               | 製品                | バックシート | パッケージ | 詳細ページ |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| 下着用               | ふだんの下着に使えるパッド              | 13.5×45cm<br>45cm |                   | 白      |       | 24    |
|                   | Rケア<br>紙パンツ用パッド<br>座位モレも防ぐ | 2回吸収              | 12.5×45cm<br>45cm |        | 水色    |       |
| 4回吸収              |                            | 14.5×52cm<br>52cm |                   | きみどり   |       |       |
| 6回吸収              |                            | 14.5×63cm<br>63cm |                   | 青      |       |       |
| Sケア長時間安心パッド       | ワイドタイプ                     | 30×56cm<br>56cm   |                   | グレー    |       | 20    |
|                   | ダブルブロックタイプ                 | 30×56cm<br>56cm   |                   | 赤むらさき  |       | 17    |
| S+ケア<br>Sケアシリーズ   | Sケア夜1枚安心パッド                | ふつうタイプ            | 30×63cm<br>63cm   | みどり    |       | 19    |
|                   |                            | 多いタイプ             | 30×63cm<br>63cm   | 青      |       |       |
|                   | 多いタイプ<br>スーパー              | 30×63cm<br>63cm   | 濃紺                |        |       |       |
|                   | 特<br>多<br>い<br>タイプ         | 30×63cm<br>63cm   | むらさき              |        |       |       |
|                   | 10回吸収                      | 32×63cm<br>63cm   | 濃いむらさき            |        | 20    |       |
|                   |                            | 12回吸収             | 32×63cm<br>63cm   | 深緑     |       |       |
| Sケア前側吸収おしりさらさらパッド |                            | 28×49cm<br>49cm   |                   | 紺色     |       | 16    |
| Sケア軟便安心パッド        |                            | 30×56cm<br>56cm   |                   | オレンジ   |       | 15    |

## パッドタイプ

| 商品名     |                 | サイズ             | 製品              | バックシート | パッケージ | 詳細ページ |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|-------|
| 昼・長時間用  | 昼安心通気パッド        | ふつうタイプ          | 28×49cm<br>49cm | ピンク    |       | 21    |
|         |                 | 多いタイプ<br>ワイドロング | 30×56cm<br>56cm | オレンジ   |       |       |
|         |                 | 特に多いタイプ         | 28×49cm<br>49cm | 水色     |       |       |
| 両面吸収シート | 両面吸収すきまにピッタリシート | 19×36cm<br>36cm |                 |        |       | 21    |

# 商品ラインナップ

## アウター(パンツ・テープ)

← 少ない 吸収量 多い →

|     |                       |                           |
|-----|-----------------------|---------------------------|
| パンツ | <br>Rケア<br>うす型さらさらパンツ | <br>Rケア<br>うす型スーパーフィットパンツ |
|     |                       |                           |
|     |                       |                           |
| テープ | <br>Rケア<br>うす型さらさらテープ | <br>Rケア<br>うす型スーパーフィットテープ |
|     |                       |                           |
|     |                       |                           |
| 長時間 | <br>長時間<br>さらさらパンツ    | <br>長時間<br>スーパーフィットパンツ    |
|     |                       |                           |
|     |                       |                           |

## インナー(パッド)

← 少ない 吸収量 多い →

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 下着用   | <br>ふだんの下着に使えるパッド       |
| パンツ併用 | <br>Rケア紙パンツ用パッド         |
| パッド   | <br>Sケアシリーズパッド          |
|       | <br>SケアシリーズRケアシリーズ      |
|       | <br>ふだんの下着に使えるパッド       |
| テープ併用 | <br>産学連携商品              |
| 通常品   | <br>昼安心通気パッド            |
| 補助商品  | <br>両面吸収すきまに<br>ピッタリシート |

## ケア用品 ウェット

|                       |                               |               |           |                              |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|
| <br>流せるおしりふき<br>(無香料) | <br>流せるおしりふき<br>(やさしいせっけんの香り) | <br>ふきとりぬれタオル | <br>からだふき | <br>温められるからだふき<br>超大判・個包装タイプ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|

# ご利用者様のADLに応じたおすすめのアウター選定

アテントはお客様の状態や排泄ケアに合わせて、アウターを複数の選択肢から選んでいただくことができます。

|              | 自立度(ADL)                     |                 |                |                    |               |      |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|------|
|              | 低                            |                 |                | 高                  |               |      |
| イメージ         |                              |                 |                |                    |               |      |
| 状態別          | テープでできる自立                    |                 |                | パンツでできる自立          |               |      |
| アウター例        | Rケア スーパーフィットテープ              | 長時間さらさらパンツ      | Rケア うす型さらさらパンツ | Rケア うす型スーパーフィットパンツ | 超うすパンツ下着爽快    | 布パンツ |
|              | パンツはご利用者様の身体状態に合わせて4種類から選択可能 |                 |                |                    |               |      |
| 推奨併用インナーシリーズ | Sケアシリーズパッド                   | Sケアシリーズ・Rケアシリーズ |                |                    | ふだんの下着に使えるパッド |      |
| インナー例        |                              |                 |                |                    |               |      |

具体的な組み合わせ

## ご利用者様のおむつ使用シーン別おすすめの組み合わせ

1. テープ利用者:テープでのモレを軽減させたい方、ギャッジアップからリハビリの第一歩へ



| 種類       | アウター   | パッド(昼)  | パッド(夜)  |
|----------|--|---|---|
| パッケージ画像  |  |   |   |
| 商品名      | Rケアスーパーフィットテープ                               | Sケア長時間安心パッドダブルブロックタイプ                                     | Sケア夜1枚安心パッド多いタイプ  |
| おすすめポイント | 動いてもおむつが伸縮することでズレやすき間ができないテープで、自立排泄に向けてサポート。 | ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてモレをブロック。拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保して尿を素早く拡散。 | ふわふわな立体的形状で肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」採用。尿を素早く効率的に吸収してモレ安心。 |
| 該当ページ    | 14   | 17  | 19  |

2. 日中パンツ・夜間テープ利用者:座位の時のモレを軽減させたい方



| 種類       | アウター(昼)                                  | アウター(夜)                                      | パッド(座位時)  |
|----------|--|--|---|
| パッケージ画像  |  |  |   |
| 商品名      | Rケアうす型さらさらパンツ                            | Rケアスーパーフィットテープ                               | Sケア長時間安心パッドダブルブロックタイプ                                     |
| おすすめポイント | すっきりストレッチラインでパッドを押さえてズレ防止。やわらかい肌触り・はき心地。 | 動いてもおむつが伸縮することでズレやすき間ができないテープで、自立排泄に向けてサポート。 | ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてモレをブロック。拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保して尿を素早く拡散。 |
| 該当ページ    | 11                                       | 14   | 17  |

3. パンツ利用者:リハビリに集中するために動きによるモレを軽減させたい方




| 種類       | アウター   | パッド(昼)  | パッド(夜)   |
|----------|--|---|--|
| パッケージ画像  |  |   |  |
| 商品名      | Rケアうす型スーパーフィットパンツ                                  | Rケア紙パンツ用パッド<br>座位モレも防く 2回吸収   | Rケア紙パンツ用パッド<br>座位モレも防く 6回吸収  |
| おすすめポイント | 脚まわりがボクサーパンツ形状でフィット性が高いから、ズレ・モレの心配なく「歩行」に集中いただけます。 | パンツ専用パッドで動きに安心。ズレ・モレ防止。「超フィット立体ギャザー」でモレやすい座位時にも安心で、Rケアうす型さらさらパンツとの併用もおすすめ。(アテント史上最长※) | ロングサイズ・高吸収量のパンツ用パッドでズレ・モレ防止。「超フィット立体ギャザー」でモレやすい座位時にも安心で、Rケアうす型さらさらパンツとの併用もおすすめ。(アテント史上最长※) |
| 該当ページ    | 11   | 12  | 12   |

※当社調べ アテント大人用紙おむつパンツ用パッド内 2023年11月時点




# Rケアうす型さらさらパンツ

●脚まわりすっきり形状ではかせやすい・はきやすい・動きやすい

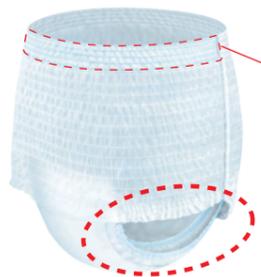

## ①脚まわりすっきり形状ではかせやすい・はきやすい・動きやすい

- 脚が引っかかりやすい部位をカットし、着脱性向上
- ②脚まわりダブルギャザーでモレ防止
  - 脚まわりに平面ギャザーと立体ギャザーを採用し、脚まわりのモレを低減
- ③「ストレッチライン」®\*の作用でパッドの併用性向上
  - パッド併用時はパッドを押さえてズレ防止。おしり部分がゴワつかずしっかりフィット。\*:「ストレッチライン」。登録商標第6642832号
- ④ムレにくいから安心
  - 通気性シート採用で、ムレを低減し、排尿後でもお肌快適


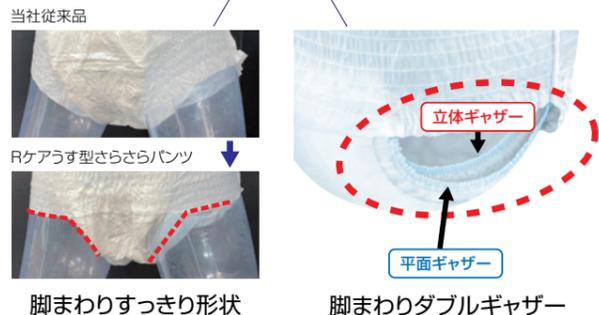


- ⑤尿を素早く引き込んであふれモレ防止
  - 引き込みラインで、尿を素早く吸収し、あふれモレに安心
  - 逆戻りにも安心、表面さらさら



# Rケアうす型スーパーフィットパンツ

●動きによるスキマを防いで、モレを低減

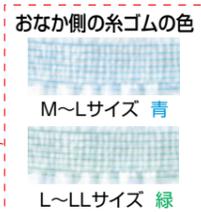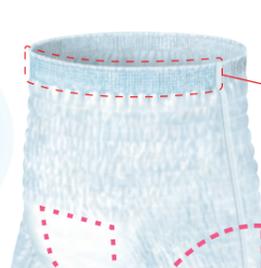

## ①脚まわりのスキマを防いでモレ防止

- おしりから太ももまでを包み込む長い股下\*「ボクサー形状」
- 太ももが細めの方にもぴったり ※当社従来品比
- ②「スリム吸収体」、「ストレッチライン」®\*1の作用でパッドの併用性向上
  - パッド併用時はパッドを押さえてズレ防止。\*2おしり部分がゴワつかずしっかりフィット。
    - \*1:「ストレッチライン」。登録商標第6642832号
    - \*2: Rケアうす型スーパーフィットパンツへの尿とりパッド併用率は96%(当社調べ n=249名)
- ③全面\*3に糸ゴムを配置し、体の動きに合わせてフィット
  - 脚まわり・おしりまわりに多本数の糸ゴムを幅広く使い、体を動かしても包み込むようにフィット。 ※3: 吸収体部分を除く
- ④尿を素早く引き込んであふれモレ防止
  - 引き込みラインで、尿を素早く吸収し、あふれモレに安心
  - 逆戻りにも安心、表面さらさら

約8.5cmロング\*  
※当社、「Rケアうす型さらさらパンツ」比

全面伸縮で脚まわりにしっかりフィット

脚まわりを覆う面積  
M~L: 188%, L~LL: 220%にアップ! ※  
※当社従来品比

### 形状によるスキマの違い

従来のショーツ品

歩いた時にできるスキマ  
脚まわりが細くなった方ではスキマができやすく、モレやすい

Rケアうす型スーパーフィットパンツ

歩いた時もスキマができにくい  
多本数のゴムが全面に幅広く配置されているので、体にしっかりフィット

「スリム吸収体」、「ストレッチライン」®の作用で、歩行時着圧69%アップ\*でスキマができにくい ※当社リニューアル前品比




# Rケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ

2回吸収/4回吸収/6回吸収 業務用  
●動きに安心 ズレ・モレ防止



## アテント史上初! 座位にもモレにくいパンツ用パッドを実現!

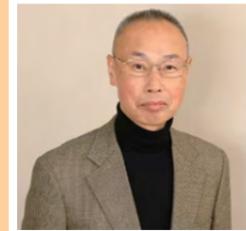

リハビリテーションを行う際は、「パンツにはパンツ専用パッドの併用」をおすすめします。専用パッドはパンツ内に収まり、腰まわりの動きや下肢の運動を制限せず、かつ、モレを減少させることから、モレの不安を軽減し、積極的かつ効率的なリハビリテーションを可能にします。パンツと専用パッドとの適切な組み合わせにより、快適な生活時間が生まれます。

東京家政大学 健康科学部  
リハビリテーション学科  
特任教授 清水順市先生


リハビリとおむつ リハビリ時におむつが要因で不満に感じること  
n=61(選択肢6件中上位2件を抜粋)

モレ(不快感を感じたり、心配に感じて動きにくいなど) **57%**

おむつをはいていることで足回りや腰回りが動かしづらい様子 **20%** ※当社調べ 2023年10月WEB調査結果

## ①座位にも強い!超フィット立体ギャザー


●糸ゴム4本で構成されたアテント紙パンツ用パッド史上最「高」\*「超フィット立体ギャザー」で脚まわりにしっかりフィット! 溢れモレ・スキマモレを抑制。\* 当社調べ 2023年11月時点

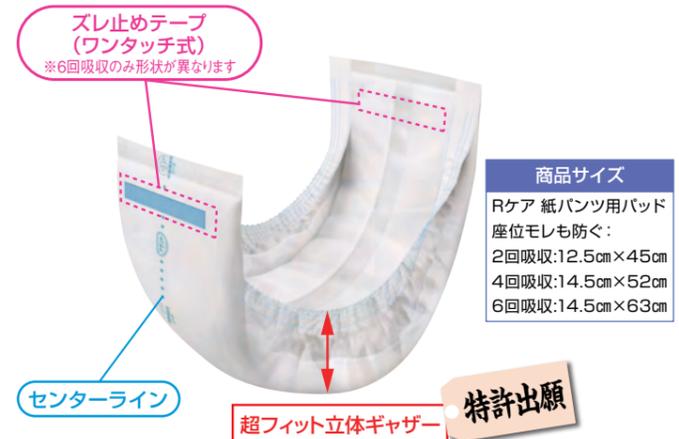

※画像はRケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ2回吸収

## ②トリプル消臭機能付き

●物理的・化学的・菌増殖抑制による3つのアプローチで臭いを抑制

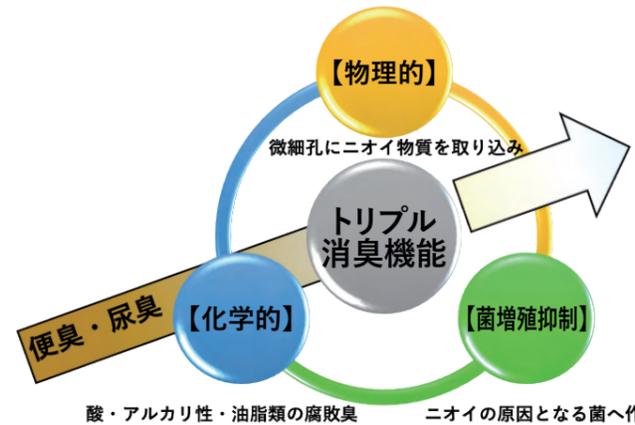

## ③超スピード吸収

●スリットが尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ、排尿口付近の逆戻りを低減

## ④やわらかな通気性バックシート

●通気性バックシート採用で、ムレを低減し、排尿後でもお肌快適

●布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」

## ⑤脚まわりすっきり形状

●股間部にぴったりフィットし、脚まわりのモコモコ感を軽減

## ⑥あてやすさの工夫で簡単装着

●二つ折り形状でパッと開いて、センターラインを目印に紙パンツに装着



## ⑦アテント史上最長\* ロングサイズ(6回吸収のみ)

●前後のモレにも安心のロングサイズ63cm 紙パンツと一緒に引き上げ簡単 ※6回吸収のみ

※当社調べ アテント大人用紙おむつパンツ用パッド内 2023年11月時点

# アテント 長時間さらさらパンツ



●逆戻りを防いで表面さらさら



- ① 排尿後もさらさら感覚でお肌安心
  - 「さらさら感覚吸収体」で逆戻りにも安心、お肌さらさら
- ② 包み込むように面でやさしくフィット
  - やわらかくてやさしいはき心地
- ③ 長時間の使用でも安心の耐久性と吸収量

- ④ 片手で上げ下げらくらくギャザー
  - 脚まわりゴムの伸縮性が高いので簡単装着
- ⑤ 前後もサイズもわかりやすい

# アテント 夜1枚安心パンツ



●夜間1枚で安心の吸収量 ●パッドなしでもずっと快適



- ① アテント紙パンツ史上最高の1,200cc吸収(約8回分)<sup>※1</sup>
  - ※1 当社調べアテント国内大人用紙パンツ内 2024年5月時点 ※2 1回の排尿量150mlとして当社測定方法による
- ② 片手で上げ下げらくらく
  - 脚まわりの伸縮性が高くひっかかりにくい

- ③ 背モレ防止ポケット採用
  - 就寝時・仰向け寝でも背中からのモレを軽減
- ④ 前後もサイズもわかりやすい

# アテント 背モレ・横モレも防ぐテープ式



●背中からのモレ・脚まわりからの横モレを防ぎます



- ① 背モレ・横モレを防止
  - 背中からの尿モレ・便モレを防ぐ「背モレ防止ポケット」
  - 脚まわりのスキマからのモレを防ぐ「横モレ防止ギャザー」
- ② つまみやすく、簡単にしっかりとまる
  - やわらかい素材で肌にやさしい「ピタッとテープ」
- ③ おむつの中心がわかりやすい
  - 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着

- ④ 幅広い体型にフィットする品揃え
  - ヒップサイズ50cm～144cmをカバー (Sサイズ) (LLサイズ)


# アテント Rケアスーパーフィットテープ



●スキマを防いでぴったりフィット



- ① スキマを防いでモレ防止
  - 太ももまわりにぐるっとフィットする「脚まわりぐるっとギャザー」
- ② 尿とりパッドのズレ防止
  - 股間部のスキマを防ぎ「脚びたフィットゾーン」で、パッドを体に密着
- ③ おなかまわりにやさしくフィット
  - 寝たり起きたり、体の動きに合わせて伸縮する「からだびったりテープ」
- ④ 背中からのモレ防止
  - 尿と軟便をせき止める「背中モレ防止立体ギャザー」 ※Sサイズは除く
- ⑤ おむつの中心がわかりやすい
  - 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着

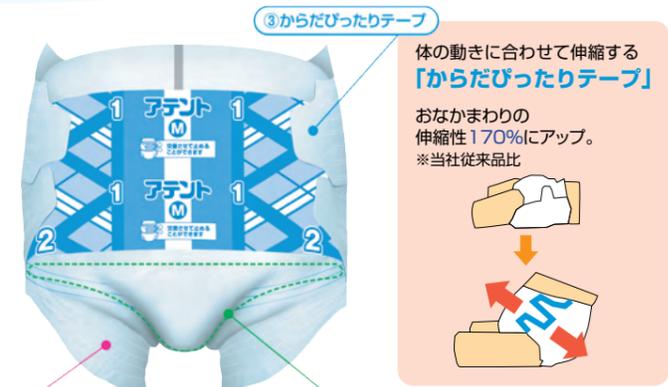

- ① 脚まわりぐるっとギャザー
  - 太ももまわりにぐるっとフィットする「脚まわりぐるっとギャザー」
  - 脚が細い方や拘縮のある方にもびったりフィット。脚まわりの伸縮性130%にアップ。 ※当社従来品比
- ② 脚びたフィットゾーン
  - 股間部のスキマを防ぐ「脚びたフィットゾーン」
  - 股間から脚まわりへと続き、体にフィット。

# アテント テープ止めタイプ



●使いやすくてぴったりフィット



- ① 背中からのモレ防止
  - 尿と軟便をせき止める「背中モレ防止立体ギャザー」 ※Sサイズは除く
- ② 装着しやすい工夫
  - 体型に合わせてぴったり止められる「真ん中分かれるテープ」
  - ※真ん中のミシン目を切り離し、上下のテープをクロスさせて止着すると、脚まわりや胴まわりが細い方にも、フィットさせやすくなります。
- ③ おむつの中心がわかりやすい
  - 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着
- ④ 幅広い体型にフィットする品揃え
  - ヒップサイズ57cm～142cmをカバー (Sサイズ) (LLサイズ)

軟便安心パッドとテープ止めタイプとの併用例



大量の軟便も背中モレ防止立体ギャザーがせき止め、衣類・寝具までのモレを防いでいます。 ※P14「Rケアスーパーフィットテープ」も同様です。





# Sケア軟便安心パッド

●尿も軟便もしっかり吸収、おしり快適

2005年9月  
業界で初めて  
発売しました




石川県立看護大学 学長  
東京大学 名誉教授  
真田弘美先生 共同研究成果を活用



20枚

2枚

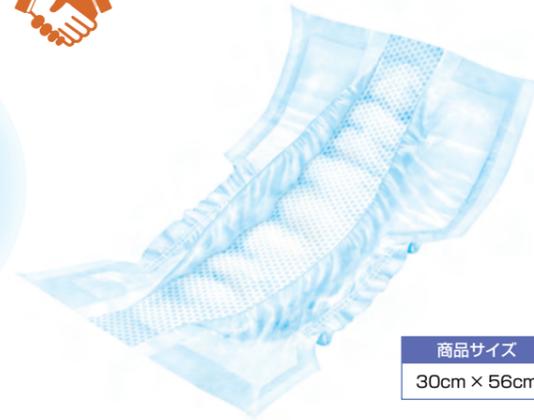

商品サイズ  
30cm × 56cm


## ①尿・便の付着を低減

●3層構造で尿・便の肌付着の面積を減らし、肌刺激を低減

尿・便を吸収することで、肌への付着面積を減らし、肌刺激を低減

便を吸収する構造

- 第1層 表面シート**  
軟便や下痢便も目詰まりしにくい網目状のシート。2層目へ素早く引き込んで表面に残さないから、さらさら感が持続。
- 第2層 ろ過シート**  
かさ高いシートで便をせき止め、水分を効率よく3層目に導いて拡散を抑える。
- 第3層 吸収体**  
1層目と2層目で引き込んだ水分をポリマーが素早く吸収。内側に封じ込め逆戻りを防止。

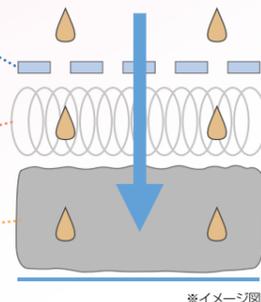

※イメージ図

|            | ※当社調べ              |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
|            | 擬似便100g注入 10分後     | 擬似便200g注入 10分後     |
| 一般的な尿とりパッド |                    |                    |
|            | 357cm <sup>2</sup> | 577cm <sup>2</sup> |
| Sケア軟便安心パッド |                    |                    |
|            | 117cm <sup>2</sup> | 168cm <sup>2</sup> |

一般的な尿とりパッドに比べ、拡散面積が約1/3  
※100g注入10分後

## ②おむつ内ムレの低減


●通気性バックシートで、ムレ低減

## ③おむつ素材による摩擦の低減


●滑らかな表面シートで摩擦を低減

### 新開孔技術採用で滑らかな表面シートへ

表面シート拡大写真

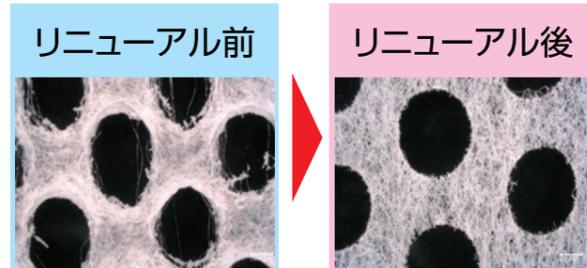

表面シートの滑らかさ比較  
(数値が小さいほうが滑らか)

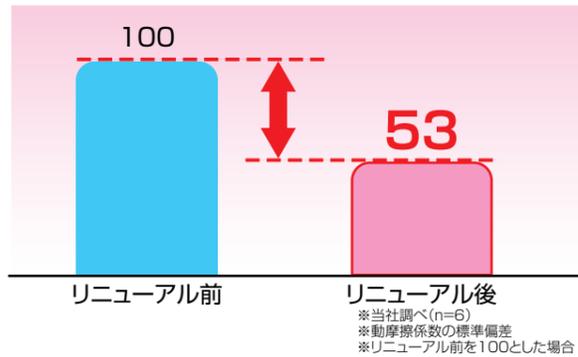

# Sケア前側吸収おしりさらさらパッド

●前側スピード吸収でおしり快適



石川県立看護大学 学長  
東京大学 名誉教授  
真田弘美先生 共同研究成果を活用



38枚




## ①尾骨・仙骨部への尿の付着による肌刺激を低減

●前側吸収ゾーンで尿を吸収して尾骨・仙骨部に流れにくい。  
スキントラブル好発部位の尾骨・仙骨部へ尿を流れにくくすることで、スキントラブル発生リスク軽減。

### 擬似尿による実験

排尿口付近の「前側吸収ゾーン」で尿をスポット吸収。従来パッドに比べて、おしり側への尿拡散を抑制。

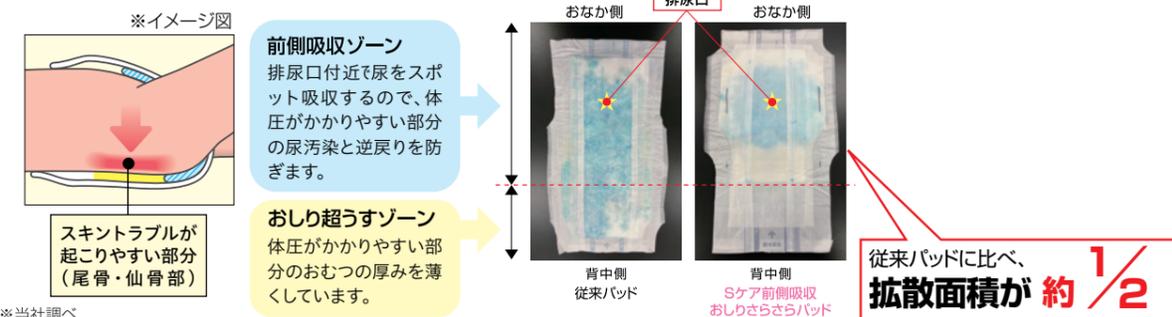

## ②尾骨・仙骨部へ体圧がかかりにくい

●厚みを低減したおしり超うすゾーン。

尾骨・仙骨部は圧がかかりやすく圧分散のために体圧分散マットを使用されている

体圧分散マットと肌との間にあるおむつの圧がかかりすぎると、体圧分散マットの効果が最大化されない




臥床傾向にある患者さんは、尿失禁を伴うと皮膚の浸軟から褥瘡発生のリスクが高まります。ですが、前側吸収おしりさらさらパッドは前側でしっかり尿を吸収してくれるので、尾骨部や仙骨部の皮膚の浸軟が回避され褥瘡予防にも有効でした。また、尾骨部や仙骨部の範囲でパッドの厚みが低減されているので除圧効果が得られます。さらに、尿量が多い場合は、パッドの交換頻度が増えることで患者さんまたは医療者側の負担が懸念されますが、吸収量が多い前側吸収おしりさらさらパッドの使用により、パッドの交換頻度の減少に繋がります。このことから、ケア負担や経済的負担の軽減にも期待できると思います。



東京大学医学部付属病院  
皮膚・排泄ケア認定看護師  
佐々木早苗様

## ③2種類のあて方マークで簡単にあてられる

●あて方マークで装着位置がわかりやすい

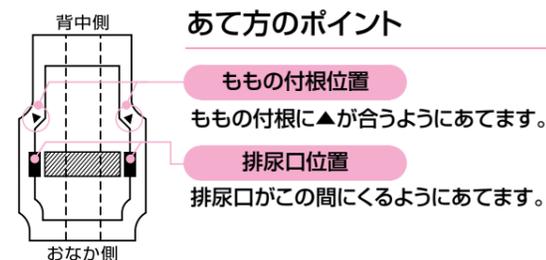


上手なあて方(ご使用前に必ずお読みください)

- 印刷面を下にして、吸収体の広い方がおなか側に向くよう開きます。▲マークがももの付根に合うようにパッドをあてます。
- パッドを山折りにして排尿口と密着するようにあててください。■ラインに排尿口がくるようにします。
- パッドが股間部にしっかりあっていることを確認してください。
- テープ式を広げて固定してください。



鳥取大学医学部附属病院 共同研究成果を活用

●サッと拡散 モレをブロック

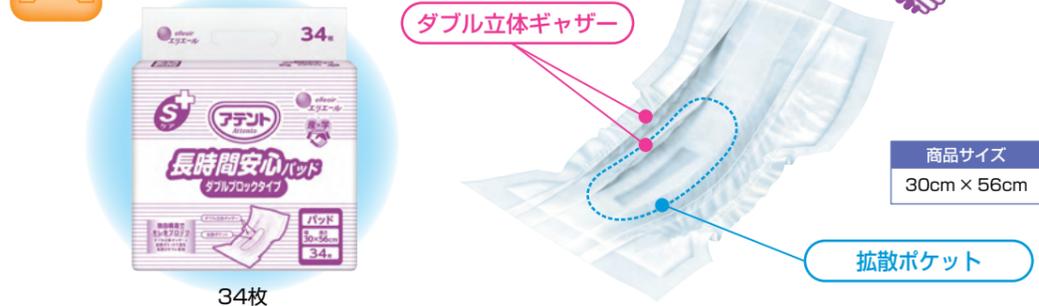

34枚

商品サイズ 30cm × 56cm

拡散ポケット

① 独自形状ですき間モレ・あふれモレをブロック


- ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてすき間モレをブロック
- 拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保し尿を素早く拡散してあふれモレをブロック

こんなモレでお困りではありませんか？



モレの発生要因をダブルブロックで解決

あふれモレは、排尿口付近に圧がかかり、尿の行き場がなくなることが要因。そのため、尿の抜け道を作り尿を拡散させる構造でモレ低減。

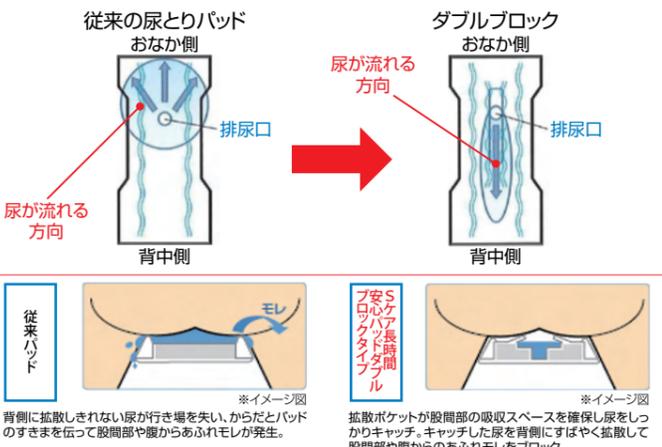



ダブルブロックでの吸収

擬似尿による検証

背側に尿が拡散し、吸収体全体を効果的に使用して、吸収します。




※鳥取大学医学部附属病院撮影 ※X線CTスキャン(コンピューター断層撮影)により、3Dで排尿拡散状況を撮影

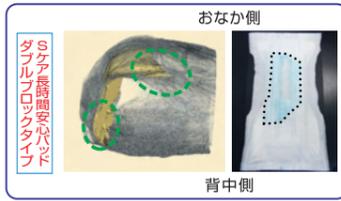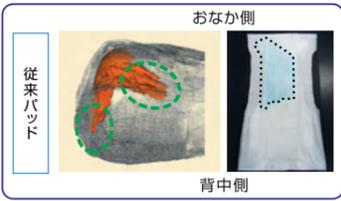

※側臥位(脚が閉じた状態)にした男性ダミー人形にRケアスーパーフィットテープと尿とりパッドを装着して、擬似尿150ml注入後の比較 ※上記X線CTスキャン画像は、左足側から見た画像

② やわらかい素材で摩擦を低減

- なめらかな表面シートと立体ギャザーの素材を採用
- 肌にあたる表面シート素材を変更し、逆戻りを低減しました。

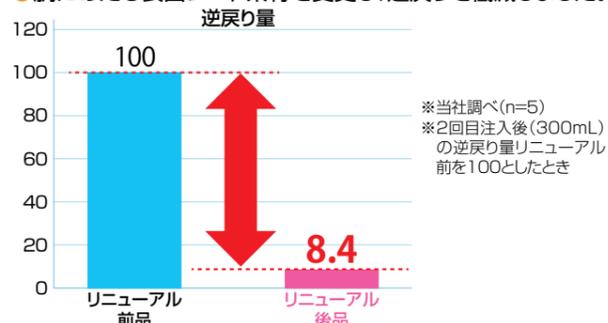

睡眠確保のためのアテントのご提案

アテントは「介護の快護化®」に向けて、Sケア夜1枚安心パッドを活用し安眠確保を重視したおむつの組み合わせをご提案します

1. 高齢者の睡眠の課題

■高齢者は特に眠りが浅く中途覚醒しやすく、睡眠不足のリスクが高い 病院施設職員の約9割が「利用者様が睡眠に課題がある」と回答(当社調べ)

【睡眠不足で起こるデメリット】

- ・認知症やフレイルの悪化
- ・脳の働きの悪化(イライラ・集中力・注意持続・記録・学習能力他)
- ・身体悪化(夜間の転倒リスク(注意持続低下・認知の低下))
- ・睡眠・覚醒リズム障害(生活リズムが崩れ日中の活動にも影響、徘徊と錯乱を伴う夜間の頻回覚醒)

高齢者の夜間のケアで実は大事なのがおむつの対応です。ただでさえ眠りが浅く中途覚醒しやすい高齢者には、おむつ交換が眠りを遮断してしまうリスクがあります。そのため、睡眠中のおむつ交換を最小限にすることが必要です。そのためには、できるだけ夜間快適で良いおむつを使うことで、おむつ交換の回数を最小限にさせていただく。そうすると睡眠が遮断される機会が減るため、おむつ交換も睡眠改善の一つのツールとして捉えていただきたいと思います。睡眠改善は、3人に1人が高齢者となる超高齢社会の日本においては重要な位置づけにあります。



広島国際大学 健康科学部長 心理学科 教授 田中秀樹先生

2. 交換回数削減によるメリット

■交換例

【交換パターン例】Rケアスーパーフィットテープ+Sケア夜1枚安心パッドシリーズ



表面シート(逆戻り防止)と吸収体(スピード吸収)で長時間使用でも肌刺激を低減 スキントラブル発生リスク軽減

■メリット

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| <p>ご利用者様</p>     | <p>健康管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間の睡眠を阻害しない</li> <li>・生活リズムを崩さずリハビリテーションができる</li> <li>・睡眠状態悪化が影響する健康リスク軽減</li> </ul> | <p>心理的負担軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・羞恥心への配慮</li> <li>・不要な露出を避けられる</li> <li>・入眠中におむつ交換されること自体が不快</li> </ul> | <p>事故リスク防止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特に夜間職員の人数が少ない時間のヒヤリハット防止</li> </ul>                 |
| <p>職員様・病院施設様</p> | <p>ケアの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・時間の創出になり、さらなるケアの充実に繋がる</li> </ul>   | <p>継続可能性の高いケア</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体力面でも無理をしすぎない(腰痛など体の不調)</li> <li>・おむつの廃棄減少でSDGsへ貢献</li> </ul>       | <p>コスト削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・おむつ費用だけでなく、交換に関わる人件費や洗濯・廃棄代ほかトータルコストメリット削減</li> </ul> |

# アテント Sケア夜1枚安心パッド

ふつうタイプ/多いタイプ/多いタイプスーパー/特に多いタイプ




パッド(ワイド形状)



●排尿量に合わせて使い分け可能なラインナップ



ふつうタイプ 30枚 多いタイプ 30枚 多いタイプスーパー 24枚 特に多いタイプ 20枚

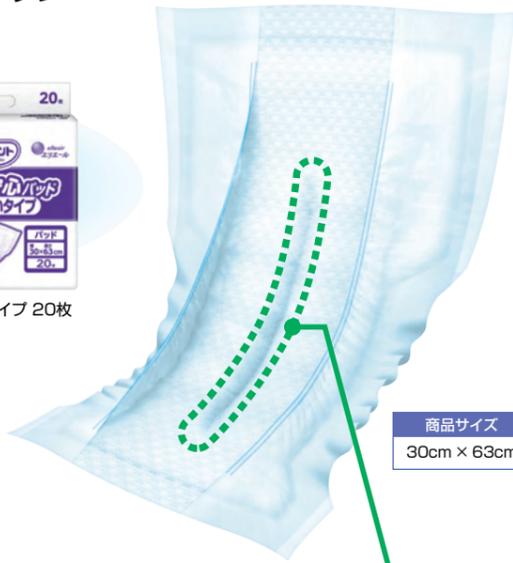

商品サイズ 30cm × 63cm

超スピード吸収スリット

①超スピード吸収スリットで尿を下層まで引き込み吸収スピード向上、あふれモレ防止


●2層の吸収体にスリットを設けて、モレ防止

②超スピード吸収スリットで体圧のかかるおしり側でも前後に拡散、横モレの防止

●背側まで伸びる1本スリットを配置、尿を前後に拡散しやすくモレ防止

## 超スピード吸収スリット

尿を素早く下層に引き込み、尿を前後に拡散

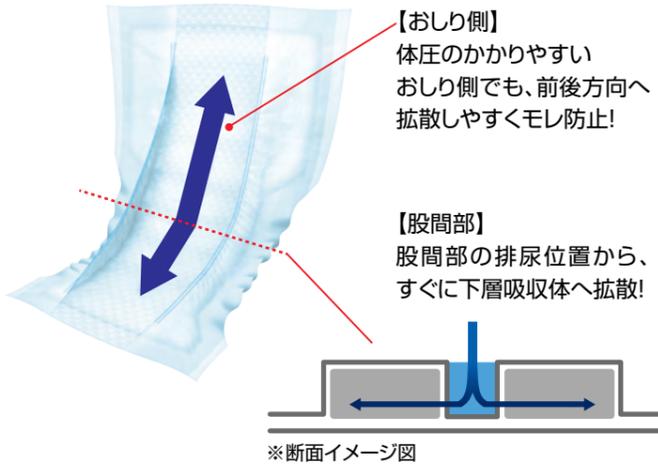

【おしり側】  
体圧のかかりやすいおしり側でも、前後方向へ拡散しやすくモレ防止!

【股間部】  
股間部の排尿位置から、すぐに下層吸収体へ拡散!

※断面イメージ図

## 当社従来品比で大幅に吸収スピードアップ!


擬似尿150mlでの吸収スピードの比較

| タイプ       | 当社従来品比 |
|-----------|--------|
| ふつうタイプ    | 2.0倍   |
| 多いタイプ     | 2.4倍   |
| 多いタイプスーパー | 2.9倍   |
| 特に多いタイプ   | 3.1倍   |

※当社調べ 擬似尿150ml注入し、吸収するまでの時間を測定(n=5)

③「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減※ ※当社従来品比

●ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」を採用

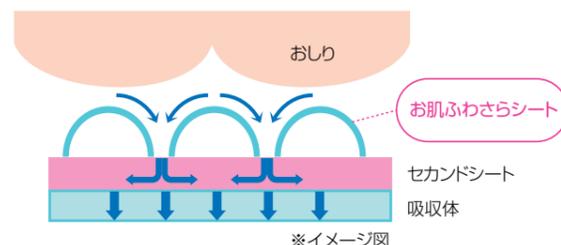

肌との接触面積が約1/2 ※当社従来品比

# アテント Sケア夜1枚安心パッド

10回吸収/12回吸収 業務用



パッド(ワイド形状)



10回吸収 16枚 12回吸収 14枚



スピード吸収スリット

商品サイズ 32cm × 63cm

①10回吸収は1,500ml、12回吸収は1,800mlの吸収量

●長時間交換できない方や交換回数を減らしたい方におすすめ

●アテント尿とりパッド史上最高の吸収量(12回吸収のみ) ※当社調べ 2023年11月現在

②スピード吸収スリットでモレ防止

●股間部に2本のスリットで尿を素早く効率的に吸収してモレ防止

③「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減※ ※当社従来品比

●ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」を採用

# アテント Sケア長時間安心パッド

ワイドタイプ




パッド(ワイド形状)



●お肌への刺激をさらに少なく、そしてさらにやわらかく



36枚

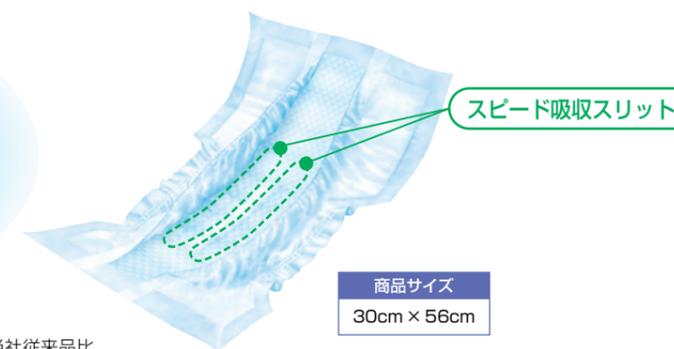

スピード吸収スリット

商品サイズ 30cm × 56cm

①肌刺激をさらに低減した吸収体※ ※当社従来品比

●肌から離れた下層吸収体で尿を素早く拡散

「逆戻りブロック吸収体」でお肌安心

②「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減※ ※当社従来品比

●ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした

「お肌ふわさらシート」を採用

③尿を素早く効率吸収してモレ安心

●股間部に2本の「スピード吸収スリット」で仰向け・横向き寝でも尿を素早くたっぷり吸収

●股間部にぴったりフィットしたパッドが、尿を素早く吸収してモレを防止

④センターラインで装着しやすい工夫



※イメージ図

矢印の先端は、吸収体の「狭い方」を示します。



# 昼安心通気パッド

ふつうタイプ/多いタイプ ワイドロング/特に多いタイプ




パッド(ワイド形状)



●やわらかな通気性バックシート採用で、こまめに交換される方もお肌快適



ふつうタイプ 51枚  
多いタイプ ワイドロング 42枚  
特に多いタイプ 45枚

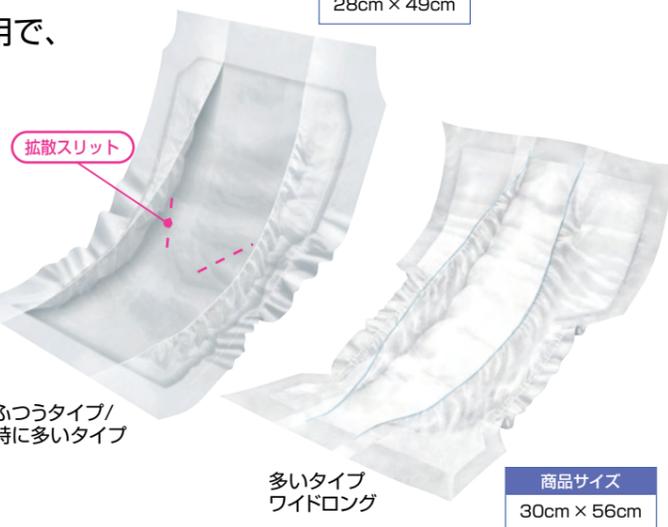

ふつうタイプ/  
特に多いタイプ

多いタイプ  
ワイドロング

商品サイズ  
28cm × 49cm

商品サイズ  
30cm × 56cm

## ① やわらかな通気性バックシート採用

- 通気性バックシート採用で、ムレを低減 排尿後でもお肌快適
- 布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」

通気性実験 ※当社調べ



一般的な非通気性パッド 昼安心通気パッド  
(パッドの下にお湯を入れたピーカーを置き、5分経過した時の様子) ※写真はふつうタイプ

## ② モレを防いで安心

- おしりをしっかり包み込むワイド形状吸収体(ふつう/特に多い)、ワイドロング形状吸収体(多いタイプ ワイドロング)
- 立体ギャザーと平面ギャザーで、脚まわりにしっかりフィット

## ③ 吸収体全面で尿を効率吸収

- すばやく吸収体全面に尿を拡散  
「拡散スリット」で尿を効率よく吸収してモレ防止(ふつう/特に多い)

## ④ センターラインで装着しやすい工夫

- 吸収体の「狭い方」がわかりやすいデザイン



ふつうタイプ 多いタイプ ワイドロング 特に多いタイプ  
矢印の先端は、吸収体の「狭い方」を示します。 ※イメージ図



# 両面吸収すきまにピッタリシート

●折ったり丸めたり 使い方自在



パッド(両面吸収)



45枚

商品サイズ  
19cm × 36cm

## ① 様々な使い方でスキマをうめてモレ防止

- シートのどこからでも吸収可能な「全面吸収構造」

## ② 吸収体の有効活用でしっかり吸収

- シートの片面から吸った尿を反対側へ透過する「尿透過構造」で、折りたたんでも重ねても吸収体を有効活用

## ③ コンパクトでたっぷり吸収する マルチシート


- ※必ず紙おむつや尿とりパッドと一緒にお使いください。
- ※シートの表側からも裏側からも尿を吸収します。

### スキマからのモレにお困りの方に

折ったり、丸めたりして、スキマをうめます。



### 吸収量不足やあふれモレにお困りの方に

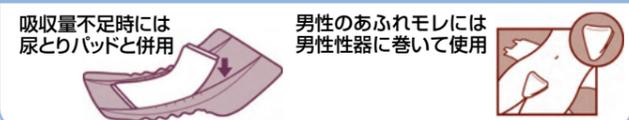

# 陰部洗浄のご提案

介護の中でも排泄ケアは、人間の尊厳に特にかかわる大変デリケートなケアです。また排泄ケアによって、介護を受ける方の生活とその質が大きく変わってしまうほど影響があります。とりわけ陰部の直接的ケアは心理的側面だけではなく、臭気やスキントラブル、感染症などのリスクにも対応する必要があります。その方の尊厳を守りながら、衛生的で気持ちの良い排泄ケアを実施することで、ご本人はもとより、介護する方にとっても負担が軽減される可能性があります。その方法の一つとして、ディスポタオルを活用した手順を説明します。



コンチネンズジャパン株式会社  
専務取締役  
NPO法人日本コンチネンズ協会  
名誉会長  
西村かおる先生

## 3 in 1 ケア

アテントはスキントラブル発生リスク防止のために陰部洗浄に必要な3ステップ(3 in 1)をSケアすすぎがいらぬ洗浄液でご提案します。



# Sケアすすぎがいらぬ洗浄液



●洗浄・保湿・保護の3つの機能! 陰部洗浄におすすめ



専用ボトル  
約100本分



350ml



1000ml

専用ボトル  
約285本分

製品イメージ  
ほのかな石鹸の香りつき



ふんわり吸水タオル

肌刺激の少ないふんわり吸水タオル(P23)との併用がおすすめです。

## ① 洗浄 天然由来の洗浄成分でお肌を清潔に

- 植物由来の石けん配合

## ② 保湿 植物由来成分を中心に10種を採用

- 3種のヒアルロン酸配合
- 5種の和漢植物由来保湿成分配合※1
- トウモロコシ由来の保湿成分配合※2

## ③ 保護 2種の肌を保護する成分を採用


- セラミド様肌保護成分配合※3
- なめらか整肌成分配合※4

※1 キハダ樹皮エキス、アカヤシオウ根エキス、ヒオウギエキス、メマツヨイグサ種子エキス、チャ葉エキス  
※2 グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン  
※3 (メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー  
※4 ポリクオタニウム-51


## すすぎ不要でお肌を清潔に保つ簡単ステップ



① 洗浄液ポンプ1プッシュ(約3.5ml)を適温(40℃前後)のお湯で300mlに希釈する。

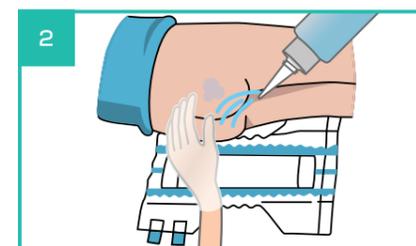

② 希釈した洗浄液でおしりを洗い流し、タオル等で汚れを落とす。

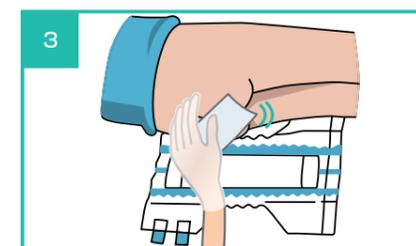

③ 洗浄後、余分な水分を拭き取る。  
※肌に残った洗浄液を水で洗い流す必要はありません。



## 介護用ディスポ(使い捨て)タオル

●介護用ディスポ(使い捨て)タオルは充実のラインナップ!!

ウエットティッシュ



シートサイズ  
22cm × 20cm

※トイレには流せません。



シートサイズ  
30cm × 30cm

※トイレには流せません。



シートサイズ  
30cm × 60cm

※トイレには流せません。



シートサイズ  
18cm × 20cm

### ふきとりぬれタオル

●手・体・おしり・身の回りのものなど幅広く使えて便利なマルチユースタイプ ●ノンアルコール、パラベン無配合 ●アロエエキス、ヒアルロン酸配合

### からだふき

●医療・福祉施設でのヒアリングをもとに設定した30cm×30cmの使いやすい大きさ  
●取り出し時にすぐに使える2つ折りタイプ ●ノンアルコール、パラベン無配合 ●アロエエキス、ヒアルロン酸配合

### 温められるからだふき超大判・個包装タイプ

●個包装タイプ ●超大判(30cm×60cm) ※ホットウォーマーには48時間以上入れたままにしないでください  
●ホットウォーマーや電子レンジでの温めが可能 ※電子レンジで温めるときは破裂を防ぐために切り込みを入れて下さい(500Wでの温め目安:10秒)

### 流せるおしりふき(無香料) 流せるおしりふき(やさしいせっけんの香り)

●プラスチック蓋で片手で楽々開け閉め ●トイレに流せるから、簡単・便利 ●ノンアルコール、パラベン無配合 ●アロエエキス、ヒアルロン酸配合



## エリエール ふんわり吸水タオル

ドライタオル



●陰部洗浄時・おむつ交換時の水分の拭取りに  
ドライで使える「使い捨ての紙タオル」

ふんわり柔らかか

サッと吸水!

### ①ドライでも ふんわり柔らかか素材!!

●薄く柔らかい紙を重ねているので、  
ふんわり柔らかかな紙タオル



シートサイズ  
37.5cm × 28cm



### ②吸収性がよく、水分の拭取りに適しています

●紙自体の吸収性の良さと、さらにエンボス加工を施しているため、  
吸収性がよく、水分を素早く吸収



## エリエール プロワイプ ストロングタオルE50・E40

ドライタオル



●濡らして絞って使える強度があるため、布タオルと  
同じように使える衛生的な「使い捨ての不織布タオル」

濡れても強い!

水に濡らすと柔らかい!



シートサイズ  
40.5cm × 28cm



シートサイズ  
19.8cm × 23cm



シートサイズ  
40.5cm × 28cm



### ①濡れても強度がある!!

●濡れても強度が低下しにくい、不織布なので、布タオルのように  
濡らして絞って温めて使用可能

### ②表面は柔らかく、しかもコシがあります

●バルブ配合の不織布なので、吸収性がよく、水分を素早く吸収できます



## ふだんの下着に使えるパッド

●安心の300ml吸収!

パッド(ストレート形状)



24枚



商品サイズ  
13.5cm × 45cm

### ①動いてもズレにくい下着用パッド

●5点ズレ止めテープ(粘着式)で動いてもズレにくい。

### ②45cmの大判サイズ

### ③超立体ギャザー



サイドギャザーなし サイドギャザーあり



## 夜つけて朝あんしん吸水パッド



20.5cm  
30cc



24cm  
50cc



26cm  
85cc

瞬間吸収スリット 30cc~85ccの仕様



商品サイズ  
26cm85cc



29cm  
130cc




33cm  
180cc



36cm  
210cc

瞬間吸収スリット 130cc~210ccの仕様

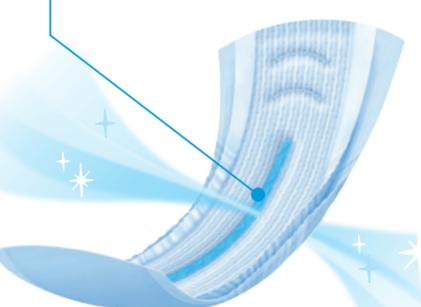

商品サイズ  
29cm130cc

### ①瞬間吸収スリット

●瞬間吸収スリット搭載で、ドッと出た水分も素早く吸引。\*  
表面に水分を残さないため、濡れ感軽減。 \*当社測定方法による。

### ②さらっと除湿

●寝ている時もお肌安心の全面通気性バックシート採用。  
ムレ軽減。

### ③消臭機能

●緑茶成分配合。汗と尿のにおいをW消臭。



# スーパーBIG

## テープ止めタイプ パンツタイプ

●足回りからのすきまモレを防ぐスーパーBIGシリーズ



ウエストまわり 50~70cm  
 体重 15~35kg  
 脚回り 23~48cm  
 ※適用寸法は目安。



28枚

14枚

ウエストまわり 50~70cm  
 体重 15~35kg  
 脚回り 24~52cm  
 ※適用寸法は目安。

### パンツタイプ

①足回りをしっかりホールドし、足回りすっきり!

●足回りすっきり形状。パッドもしっかりホールド

②肌にやさしいやわらかさ

③夜一枚でも安心の吸収量

●おしっこ3~4回\*をさっと吸収。吸収した尿を中にぎゅっと閉じ込めるから、逆戻りせずおしりさらさら  
※1回の吸収量を120ccとしたとき

④下着のようなPOPなデザイン

⑤通気性のバックシートでムレにくい

### テープ止めタイプ

①足回りギャザーで、モレ安心!

●足回りギャザーが、足回りからのモレをブロック

②背モレもしっかりガード

●背中側のウエストシャーリングで、細めのウエストの方もしっかりフィットし、隙間ができてにくい


③薄型なのに長時間しっかり吸収

●おしっこ3~4回\*をさっと吸収。吸収した尿を中にぎゅっと閉じ込めるから、逆戻りせずおしりさらさら  
※1回の吸収量を120ccとしたとき

④選べるデザイン(全5種類)

●年齢、性別に関係なく幅広く使えるデザイン

1パックに5種類のデザイン入り

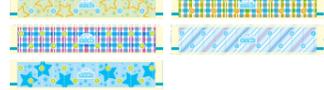

⑤通気性のバックシートでムレにくい



# スーパーBIG

## 安心吸収パッド

パッド(ストレート形状)

①立体ギャザーで、足回りからのすきまモレ安心!

●足回りのギャザーが立体形状になったことで、足回りに隙間ができてにくい

②スーパーBIGテープ・パンツにすっぽり入るから装着簡単!

●アウターへ装着しやすい大きさ。さらに、スレ止めテープが2ヶ所にあるため、ずれにくい

③薄型なのに安心のパワフル吸収

●おしっこ2回\*をしっかり吸収し、中に閉じ込めるから、排尿後はベタつかず、おしりさらさら  
※1回の吸収量を120ccとしたとき

④通気性のバックシートでムレにくい



26枚



商品サイズ  
 13.5cm×45cm




### モレでお困りの方に

スーパーBIGシリーズでセット使いをすれば、パッドで吸収しきれない場合のあふれモレをカバー。

#### セット使いのひみつ


- Point1 テープにパッドを入れやすい。
- Point2 パッドのズレ止め2ヶ所ですれにくい。
- Point3 パッドの足回りギャザーでモレをカバー。
- Point4 パッドからあふれた場合は、テープの足回りギャザーでモレをカバー。

#### 装着したときの足回りギャザーのイメージ図

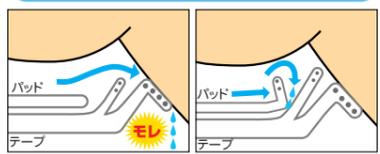

排尿量が多くて、パッドからあふれた時も、アウターで外へのモレをカバー。

アウター(テープ)にパッドをセットし、従来品でモレが発生するまで吸収させた後の様子 ※当社調べ

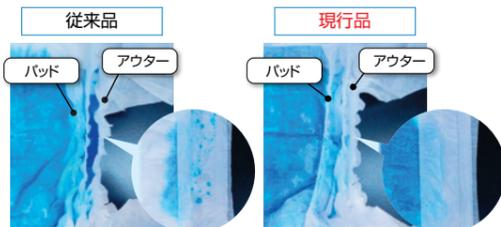

従来品: テープのギャザーを越えてモレが発生。  
現行品: テープ+パッドがしっかり吸収。

パッドの改良により、現行品は、アウター+パッド全体の吸収量がアップ! アウターの外へモレにくくなりました。

## 除菌できるアルコールタオル

### 除菌できるアルコールタオル

●拭くだけ簡単!身のまわり品の除菌に



<ボトルタイプ>

シートサイズ 13cm×20cm



本体100枚

●身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去

●アロエベラ葉エキス配合

<大容量(バケツ)タイプ>

シートサイズ 14cm×19cm



大容量本体400枚

●速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくい

●大容量詰めかえ用400枚

## 超除菌できるアルコールタオル パワープラス

### 超除菌できるアルコールタオル



本体70枚 つめかえ用60枚

- ウイルス・菌を除去。48時間、菌の増殖を防ぐ抗菌・防臭機能付き
- 液量たっぷりでおしり感が持続するので、1枚で拭ける範囲が広がります
- 超厚手シート ●アロエベラ葉エキス配合

## 除菌できるアルコールタオル

### 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用

●ウイルス・菌を拭き取り除去!



<ボトルタイプ>

シートサイズ 13cm×20cm



本体80枚

●アルコールとポリアミノプロピルピグアニド配合。拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去

●ウイルス除去用 ●アロエベラ葉エキス配合

<大容量(バケツ)タイプ>

シートサイズ 14cm×19cm



大容量本体320枚

●大容量詰めかえ用320枚

## 消毒できるアルコールタオル



本体80枚 つめかえ用70枚

- 有効成分「塩化ベンザルコニウム0.05%」を配合
- 手指をしっかり洗浄・消毒
- 水分をたっぷり含んだふんわり厚手シートを採用。拭き応えがあり、肌触りもよいのでやさしく拭き取れます



## エリエール サージカルマスク

日本製 不織布マスク

- ①日本産業規格JIS T 9001適合番号取得。※1
- ※1 医療用マスククラスII規格適合番号M22109032
- ②ウイルス飛沫もしっかりブロック。※2
- ※2 フィルター部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)
- ③独自の「やわらかフィット耳掛け」採用
- 長時間使用でも耳にやさしい。
- ④厚手の不織布で、へたりにくく毛羽立ちにくい。



ふつうサイズ 50枚入



ふつうサイズ 約175mm×90mm

やわらかフィット 耳掛け

※イメージ図



## エリエール サージカルマスク スマートタイプ

日本製 不織布マスク

- ①日本産業規格JIS T 9001適合番号取得。※1
- ※1 医療用マスククラスI規格適合番号M12111014
- ②ウイルス飛沫もしっかりブロック。※2
- ※2 フィルター部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)
- ③高透气素材採用で息がしやすい。※3
- ※3 当社「サージカルマスク」との比較
- 高い捕集性能と通気性を両立した不織布を採用。
- ④独自の「やわらかフィット耳掛け」採用
- 長時間使用でも耳にやさしい。



ふつうサイズ 50枚入



ふつうサイズ 約175mm×90mm

やわらかフィット 耳掛け

※イメージ図

# エルヴェール TOILET TISSUE PAPER TOWEL

## エルヴェール リサイクルパルプ使用 TOILET TISSUE

|      | パック  | 個包装  |
|------|--|--|
| シングル |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル170m6R<br/>(芯なし)<br/>ロール寸法:107mm×170m</p>    |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル65m個包装<br/>(ミシン目入り)<br/>ロール寸法:114mm×65m</p>   |
|      |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル200m6R<br/>(芯なし)<br/>ロール寸法:107mm×200m</p>    |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル100m個包装<br/>(ミシン目入り)<br/>ロール寸法:114mm×100m</p> |
|      |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル170m個包装<br/>(芯なし)<br/>ロール寸法:107mm×170m</p> |  <p>エルヴェールトイレティッシュ<br/>シングル170m個包装<br/>(芯なし)<br/>ロール寸法:107mm×170m</p>   |

## エルヴェール リサイクルパルプ使用 PAPER TOWEL

|      | 小判サイズ  | 中判サイズ   |
|------|--|---|
| シングル |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>シングル200枚 (小判)<br/>シート寸法:170×220mm</p>    |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>シングル200枚 (中判)<br/>シート寸法:170×210mm</p>     |
|      |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>シングル200枚 (小判)<br/>シート寸法:230×220mm</p>    |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>シングル200枚 (中判)<br/>シート寸法:230×210mm</p>   |
| ダブル  |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>ダブル200組400枚 (小判)<br/>シート寸法:170×210mm</p> |  <p>エルヴェール<br/>ペーパータオルエコ<br/>ダブル200組400枚 (中判)<br/>シート寸法:230×210mm</p> |

# 商品規格一覧

| パンツタイプ   |  | アテント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用 P11  | アテント Rケア うす型さらさらパンツ M-L 22枚 業務用 P11   | アテント Rケア うす型さらさらパンツ L-LL 20枚 業務用 P11   |
|--|--|--|---|--|
|   |  |   |    |   |
| A T R ウ ス サ ラ P S 2 2 G  |  | A T R ウ ス サ ラ P S 2 2 G  | A T R ウ ス サ ラ P M 2 2 G   | A T R ウ ス サ ラ P L 2 0 G  |
| 4 902011 769593  |  | 4 902011 769609  | 4 902011 769613   | 4 902011 769616  |
| 《伝》アテントRケアうす型さらさらPS22G<br>《I》1 4902011 769590<br>《品》21000928<br>個装入数 22枚 ケース入数 3パック<br>【個装】325×225×185mm 918g<br>【ケース】384×576×230mm 3.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 52~75cm    |  | 《伝》アテントRケアうす型さらさらPM22G<br>《I》1 4902011 769606<br>《品》21000929<br>個装入数 22枚 ケース入数 3パック<br>【個装】325×225×185mm 919g<br>【ケース】384×576×230mm 3.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 60~95cm              | 《伝》アテントRケアうす型さらさらPL20G<br>《I》1 4902011 769613<br>《品》21000930<br>個装入数 20枚 ケース入数 3パック<br>【個装】360×235×185mm 922g<br>【ケース】384×576×230mm 3.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 80~125cm              |  |
| アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ M-L 22枚 業務用 P11  |  | アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ L-LL 20枚 業務用 P11   | アテント 長時間さらさらパンツ S 20枚 業務用 P13   | アテント 長時間さらさらパンツ M-L 20枚 業務用 P13  |
|   |  |   |    |   |
| A T R ハ ン ツ M 2 2 G  |  | A T R ハ ン ツ L 2 0 G  | A T チ ョ ジ カ ン P S 2 0 G   | A T チ ョ ジ カ ン P M 2 0 G  |
| 4 902011 106732  |  | 4 902011 106749  | 4 902011 770568   | 4 902011 770575  |
| 《伝》アテントRケアうす型SFパンツM22G<br>《I》1 4902011 106739<br>《品》21000540<br>個装入数 22枚 ケース入数 3パック<br>【個装】345×263×155mm 1,097g<br>【ケース】372×530×265mm 3.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 60~95cm |  | 《伝》アテントRケアうす型SFパンツL20G<br>《I》1 4902011 106746<br>《品》21000541<br>個装入数 20枚 ケース入数 3パック<br>【個装】355×260×165mm 1,092g<br>【ケース】372×530×265mm 3.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 80~125cm          | 《伝》アテントチョウジカンパンツS20G<br>《I》1 4902011 770565<br>《品》20773916<br>個装入数 20枚 ケース入数 3パック<br>【個装】340×250×185mm 1,444g<br>【ケース】356×560×255mm 4.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 52~75cm              | 《伝》アテントチョウジカンパンツM20G<br>《I》1 4902011 770572<br>《品》20773917<br>個装入数 20枚 ケース入数 3パック<br>【個装】340×250×185mm 1,446g<br>【ケース】356×560×255mm 4.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 60~95cm |
| アテント 長時間さらさらパンツ L-LL 18枚 業務用 P13   |  | アテント 夜1枚安心パンツパッドなしでずっと快適 男女共用 M14枚 P13   | アテント 夜1枚安心パンツパッドなしでずっと快適 男女共用 L12枚 P13  |  |
|   |  |   |    |  |
| A T チ ョ ジ カ ン P L L 1 8 G  |  | A ヨ 1 P M 1 4 A  | A ヨ 1 P L L 1 2 A   |  |
| 4 902011 770582  |  | 4 902011 775761  | 4 902011 775778   |  |
| 《伝》アテントチョウジカンパンツL18G<br>《I》1 4902011 770589<br>《品》20773918<br>個装入数 18枚 ケース入数 3パック<br>【個装】340×250×185mm 1,437g<br>【ケース】356×560×255mm 4.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 80~125cm |  | 《伝》アテントヨル1マイパンツM14A<br>《I》1 4902011 775768<br>《品》20773919<br>個装入数 14枚 ケース入数 3パック<br>【個装】340×245×185mm 1,369g<br>【ケース】356×560×255mm 4.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 60~95cm<br>後処理テープ付き | 《伝》アテントヨル1マイパンツL12A<br>《I》1 4902011 775775<br>《品》20773920<br>個装入数 12枚 ケース入数 3パック<br>【個装】340×245×185mm 1,251g<br>【ケース】356×560×255mm 4.4kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ウエストまわり 80~125cm<br>後処理テープ付き |  |
| アテント Rケア スーパーフィットテープ S 24枚 業務用 P14   |  | アテント Rケア スーパーフィットテープ M 22枚 業務用 P14   | アテント Rケア スーパーフィットテープ L 20枚 業務用 P14  | アテント テープ止めタイプ S 22枚 業務用 P14  |
|   |  |   |    |   |
| A T R テ ー プ S 2 4 G  |  | A T R テ ー プ M 2 2 G  | A T R テ ー プ L 2 0 G   | A T テ ー プ 止 め タ イ プ S 2 2 G  |
| 4 902011 770087  |  | 4 902011 770094  | 4 902011 770100   | 4 902011 768237  |
| 《伝》アテントRケアSFテープS24G<br>《I》1 4902011 770084<br>《品》20773008<br>個装入数 24枚 ケース入数 3パック<br>【個装】225×437×195mm 1,929g<br>【ケース】239×594×444mm 6.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ヒップサイズ 57~75cm    |  | 《伝》アテントRケアSFテープM22G<br>《I》1 4902011 770091<br>《品》20773009<br>個装入数 22枚 ケース入数 3パック<br>【個装】266×428×200mm 2,278g<br>【ケース】276×608×434mm 7.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ヒップサイズ 65~95cm              | 《伝》アテントRケアSFテープL20G<br>《I》1 4902011 770107<br>《品》20773010<br>個装入数 20枚 ケース入数 3パック<br>【個装】296×405×205mm 2,409g<br>【ケース】308×620×410mm 8.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ヒップサイズ 80~125cm              | 《伝》アテントテープドメタイプS22G<br>《I》1 4902011 768234<br>《品》20763823<br>個装入数 22枚 ケース入数 3パック<br>【個装】230×375×190mm 1,644g<br>【ケース】245×590×396mm 5.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様  ヒップサイズ 57~75cm  |

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。  
★品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>多いタイプスーパー 24枚 業務用 <b>P19</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>多いタイプスーパー 24枚 業務用</p>  |
| <p>ASNP   オ   SP   24   G</p> <p>4 902011 105315</p> <p>《伝》アデントSケアヨル1オオスーパー24G<br/>《I》1 4902011 105312<br/>《品》21000447</p> <p>個装人数 24枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 285×325×201mm 2,098g<br/>【ケース】 580×408×331mm 9.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×63cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>多いタイプ 30枚 業務用 <b>P19</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>多いタイプ 30枚 業務用</p>   |
| <p>ATS   N   P   D   オ   30   G</p> <p>4 902011 105292</p> <p>《伝》アデントSケアヨル1オオI30G<br/>《I》1 4902011 105299<br/>《品》21000446</p> <p>個装人数 30枚 ケース人数 3パック<br/>【個装】 292×398×201mm 2,367g<br/>【ケース】 304×609×410mm 8.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×63cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>ふつうタイプ 30枚 業務用 <b>P19</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>ふつうタイプ 30枚 業務用</p>   |
| <p>ATS   N   P   D   フ   30   G</p> <p>4 902011 105285</p> <p>《伝》アデントSケアヨル1フツウ30G<br/>《I》1 4902011 105282<br/>《品》21000445</p> <p>個装人数 30枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 285×325×201mm 1,897g<br/>【ケース】 582×408×331mm 8.5kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×63cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 長時間安心パッド<br/>ダブルブロックタイプ 34枚 業務用 <b>P17</b> ★</p> <p>アデント Sケア 長時間安心パッド<br/>ダブルブロックタイプ 34枚 業務用</p>  |
| <p>ATS   D   B   P   D   34   G</p> <p>4 902011 119237</p> <p>《伝》アデントSケアチョウブロック34G<br/>《I》1 4902011 119234<br/>《品》21001539</p> <p>個装人数 34枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 291×344×178mm 1,964g<br/>【ケース】 595×369×351mm 8.8kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×56cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント テープ式<br/>M 30枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用 <b>P13</b> ★</p> <p>アデント テープ式<br/>M 30枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用</p>  |
| <p>ア   テ   ン   T   M   30   G</p> <p>4 902011 761023</p> <p>《伝》アデントテープ式M30G<br/>《I》1 4902011 761020<br/>《品》20763658</p> <p>個装人数 30枚 ケース人数 2パック<br/>【個装】 260×520×210mm 3,181g<br/>【ケース】 275×535×436mm 7.4kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 70～95cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント テープ止めタイプ<br/>LL 15枚 業務用 <b>P14</b> ★</p> <p>アデント テープ止めタイプ<br/>LL 15枚 業務用</p>  |
| <p>ア   テ   ー   L   L   15   G</p> <p>4 902011 768244</p> <p>《伝》アデントテープ止めタイプLL15G<br/>《I》1 4902011 768241<br/>《品》20763824</p> <p>個装人数 15枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 310×265×200mm 1,559g<br/>【ケース】 329×550×426mm 7.1kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 84～142cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント テープ止めタイプ<br/>L 20枚 業務用 <b>P14</b> ★</p> <p>アデント テープ止めタイプ<br/>L 20枚 業務用</p>   |
| <p>ア   テ   ー   L   20   G</p> <p>4 902011 120219</p> <p>《伝》アデントテープ止めタイプL20G<br/>《I》1 4902011 120216<br/>《品》21001634</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 310×314×200mm 1,870g<br/>【ケース】 329×635×406mm 8.8kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 80～125cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント テープ止めタイプ<br/>M 20枚 業務用 <b>P14</b> ★</p> <p>アデント テープ止めタイプ<br/>M 20枚 業務用</p>   |
| <p>ア   テ   ー   M   20   G</p> <p>4 902011 761030</p> <p>《伝》アデントテープ止めタイプM20G<br/>《I》1 4902011 761037<br/>《品》21001176</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 260×314×200mm 1,724g<br/>【ケース】 280×635×406mm 7.9kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 65～100cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 前側吸収<br/>おしりさらさらパッド 38枚 業務用 <b>P16</b> ★</p> <p>アデント Sケア 前側吸収<br/>おしりさらさらパッド 38枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   オ   シ   リ   P   D   38   G</p> <p>4 902011 115994</p> <p>《伝》アデントSケアヨリサラサラPD38G<br/>《I》1 4902011 115991<br/>《品》21001286</p> <p>個装人数 38枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 300×370×140mm 2,264g<br/>【ケース】 316×575×390mm 10.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  28×49cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>12回吸収 14枚 業務用 <b>P20</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>12回吸収 14枚 業務用</p>  |
| <p>ATS   ョ   ル   I   P   D   14   G</p> <p>4 902011 106763</p> <p>《伝》アデントSケアヨルIPD12カイ14G<br/>《I》1 4902011 106760<br/>《品》21000543</p> <p>個装人数 14枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 287×286×198mm 1,752g<br/>【ケース】 560×408×293mm 7.8kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  32×63cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>10回吸収 16枚 業務用 <b>P20</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>10回吸収 16枚 業務用</p>  |
| <p>ATS   ョ   ル   I   P   D   16   G</p> <p>4 902011 106756</p> <p>《伝》アデントSケアヨルIPD10カイ16G<br/>《I》1 4902011 106753<br/>《品》21000542</p> <p>個装人数 16枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 287×286×198mm 1,843g<br/>【ケース】 560×408×293mm 8.2kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  32×63cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>特に多いタイプ 20枚 業務用 <b>P19</b> ★</p> <p>アデント Sケア 夜1枚安心パッド<br/>特に多いタイプ 20枚 業務用</p>   |
| <p>ATS   N   P   D   20   G</p> <p>4 902011 105308</p> <p>《伝》アデントSケアヨルトクオオ20G<br/>《I》1 4902011 105305<br/>《品》21000448</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 285×302×201mm 1,931g<br/>【ケース】 582×408×309mm 8.6kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×63cm</p> |

パッドタイプ

|  |
|--|
| <p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式<br/>LL20枚 業務用 <b>P13</b> ★</p> <p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式<br/>LL20枚 業務用</p>   |
| <p>ア   テ   ン   T   L   L   20   G</p> <p>4 902011 103274</p> <p>《伝》アデントテープ式LL20<br/>《I》1 4902011 103271<br/>《品》21000258</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 2パック<br/>【個装】 294×465×210mm 2,666g<br/>【ケース】 315×480×430mm 6.2kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 90～144cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式<br/>S34枚 業務用 <b>P13</b> ★</p> <p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式<br/>S34枚 業務用</p>   |
| <p>ア   テ   ン   T   S   34   G</p> <p>4 902011 103250</p> <p>《伝》アデントテープ式S34<br/>《I》1 4902011 103257<br/>《品》21000252</p> <p>個装人数 34枚 ケース人数 2パック<br/>【個装】 462×306×170mm 2,970g<br/>【ケース】 320×465×355mm 6.7kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 50～75cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント テープ式<br/>L 26枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用 <b>P13</b> ★</p> <p>アデント テープ式<br/>L 26枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用</p>   |
| <p>ア   テ   ン   T   L   26   G</p> <p>4 902011 761047</p> <p>《伝》アデントテープ式L26G<br/>《I》1 4902011 761044<br/>《品》20763659</p> <p>個装人数 26枚 ケース人数 2パック<br/>【個装】 294×510×210mm 3,457g<br/>【ケース】 315×520×430mm 7.8kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  ヒップサイズ 90～125cm</p> |

吸水ケア用品

|   |
|---|
| <p>アデント ふだんの下着に使えるパッド<br/>300ml 24枚 業務用 <b>P24</b> ★</p> <p>アデント ふだんの下着に使えるパッド<br/>300ml 24枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   シ   タ   キ   P   D   300   0</p> <p>4 902011 105018</p> <p>《伝》アデントフダンノシタキPD300<br/>《I》1 4902011 105015<br/>《品》21000457</p> <p>個装人数 24枚 ケース人数 8パック<br/>【個装】 200×230×135mm 647g<br/>【ケース】 425×568×250mm 5.9kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  13.5×45cm 吸収量 300ml<br/>5スレ止めテープ付き(粘着式)</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント Sケア 軟便安心パッド<br/>2枚 業務用 <b>P15</b> ★</p> <p>アデント Sケア 軟便安心パッド<br/>2枚 業務用</p>   |
| <p>A   T   ナ   N   ベ   ン   2   G</p> <p>4 902011 761122</p> <p>《伝》アデントSケアナンベンパッド2G<br/>《I》1 4902011 761129<br/>《品》20774011</p> <p>個装人数 2枚 ケース人数 10パック<br/>【個装】 180×140×67mm 137g<br/>【ケース】 199×350×295mm 1.7kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×56cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント Sケア 軟便安心パッド<br/>20枚 業務用 <b>P15</b> ★</p> <p>アデント Sケア 軟便安心パッド<br/>20枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   ナ   N   ベ   ン   20   G</p> <p>4 902011 761115</p> <p>《伝》アデントSケアナンベンパッド20G<br/>《I》1 4902011 761112<br/>《品》20774010</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 288×265×180mm 1,346g<br/>【ケース】 586×391×273mm 6.1kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×56cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント 両面吸収すまじにビタリシート<br/>45枚 業務用 <b>P21</b> ★</p> <p>アデント 両面吸収すまじにビタリシート<br/>45枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   リ   ョ   ウ   P   D   45   G</p> <p>4 902011 762983</p> <p>《伝》アデントリョウメンキュウシュウPD45G<br/>《I》1 4902011 762980<br/>《品》20763298</p> <p>個装人数 45枚 ケース人数 8パック<br/>【個装】 263×275×110mm 1,277g<br/>【ケース】 538×453×291mm 11.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  19×36cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>6回吸収 18枚 業務用 <b>P12</b> ★</p> <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>6回吸収 18枚 業務用</p>   |
| <p>A   R   P   P   D   サ   イ   18   G</p> <p>4 902011 112634</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ18G<br/>《I》1 4902011 112631<br/>《品》21001054</p> <p>個装人数 18枚 ケース人数 6パック<br/>【個装】 288×320×143mm 1,256g<br/>【ケース】 587×435×340mm 8.5kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  14.5×63cm<br/>スレ止めテープ付き(ワンタッチ式)両</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>4回吸収 28枚 業務用 <b>P12</b> ★</p> <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>4回吸収 28枚 業務用</p>  |
| <p>A   R   P   P   D   サ   イ   28   G</p> <p>4 902011 112627</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ28G<br/>《I》1 4902011 112624<br/>《品》21001396</p> <p>個装人数 28枚 ケース人数 8パック<br/>【個装】 228×395×144mm 1,287g<br/>【ケース】 475×590×406mm 11.5kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  14.5×62cm<br/>スレ止めテープ付き(ワンタッチ式)両</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>2回吸収 48枚 業務用 <b>P12</b> ★</p> <p>アデント 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ<br/>2回吸収 48枚 業務用</p>   |
| <p>A   R   P   P   D   サ   イ   48   G</p> <p>4 902011 775754</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ48G<br/>《I》1 4902011 775751<br/>《品》21001052</p> <p>個装人数 48枚 ケース人数 3パック<br/>【個装】 416×258×131mm 1,401g<br/>【ケース】 435×410×275mm 4.9kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  12.5×45cm<br/>スレ止めテープ付き(ワンタッチ式)両</p> |

|  |
|--|
| <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド29cm130cc 16枚 <b>P24</b> ★</p> <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド29cm130cc 16枚</p>   |
| <p>ナ   チ   ア   サ   F   I   30   A   16</p> <p>4 902011 111187</p> <p>《伝》ナチュラアサ29cm130ccA16<br/>《I》1 4902011 111184<br/>《品》21000978</p> <p>個装人数 16枚 ケース人数 18パック<br/>【個装】 210×135×97mm 255g<br/>【ケース】 291×449×424mm 5.4kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  29cm 130cc</p> |

|  |
|--|
| <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド26cm85cc 20枚 <b>P24</b> ★</p> <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド26cm85cc 20枚</p>   |
| <p>ナ   チ   ア   サ   E   85   A   20</p> <p>4 902011 111163</p> <p>《伝》ナチュラアサ26cm85ccA20<br/>《I》1 4902011 111160<br/>《品》21000976</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 24パック<br/>【個装】 200×123×90mm 230g<br/>【ケース】 274×534×446mm 6.7kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  26cm 85cc</p> |

|  |
|--|
| <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド24cm50cc 20枚 <b>P24</b> ★</p> <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド24cm50cc 20枚</p>   |
| <p>ナ   チ   ア   サ   D   50   A   20</p> <p>4 902011 111149</p> <p>《伝》ナチュラアサ24cm50ccA20<br/>《I》1 4902011 111146<br/>《品》21000975</p> <p>個装人数 20枚 ケース人数 24パック<br/>【個装】 184×133×98mm 186g<br/>【ケース】 300×531×403mm 5.4kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  24cm 50cc</p> |

|  |
|--|
| <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド20.5cm30cc 24枚 <b>P24</b> ★</p> <p>ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br/>吸水パッド20.5cm30cc 24枚</p>   |
| <p>ナ   チ   ア   サ   C   30   A   24</p> <p>4 902011 111125</p> <p>《伝》ナチュラアサ20.5cm30ccA24<br/>《I》1 4902011 111122<br/>《品》21000975</p> <p>個装人数 24枚 ケース人数 24パック<br/>【個装】 172×120×82mm 152g<br/>【ケース】 346×386×369mm 4.4kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  20.5cm 30cc</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント Sケア 長時間安心パッド<br/>ワイドタイプ 36枚 業務用 <b>P20</b> ★</p> <p>アデント Sケア 長時間安心パッド<br/>ワイドタイプ 36枚 業務用</p>   |
| <p>A   T   S   ワ   イ   P   D   36   G</p> <p>4 902011 768220</p> <p>《伝》アデントSケアチョウワイド36G<br/>《I》1 4902011 768227<br/>《品》20773522</p> <p>個装人数 36枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 293×340×180mm 1,829g<br/>【ケース】 595×369×346mm 8.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×56cm</p> |

|  |
|--|
| <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>特に多いタイプ 45枚 業務用 <b>P21</b> ★</p> <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>特に多いタイプ 45枚 業務用</p>   |
| <p>A   T   ヒ   ル   P   D   45   G</p> <p>4 902011 770483</p> <p>《伝》アデントヒルツッキPtクオオ45G<br/>《I》1 4902011 770480<br/>《品》20773537</p> <p>個装人数 45枚 ケース人数 6パック<br/>【個装】 279×325×145mm 2,059g<br/>【ケース】 567×451×331mm 13.3kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  28×49cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>多いタイプワイドロング 42枚 業務用 <b>P21</b> ★</p> <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>多いタイプワイドロング 42枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   ヒ   ル   P   W   L   42   G</p> <p>4 902011 775389</p> <p>《伝》アデントヒルツッキPワイドロング42G<br/>《I》1 4902011 775386<br/>《品》20773564</p> <p>個装人数 42枚 ケース人数 4パック<br/>【個装】 284×340×180mm 1,789g<br/>【ケース】 582×369×346mm 8.0kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  30×56cm</p> |

|   |
|---|
| <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>ふつうタイプ 51枚 業務用 <b>P21</b> ★</p> <p>アデント 昼安心通気パッド<br/>ふつうタイプ 51枚 業務用</p>  |
| <p>A   T   ヒ   ル   P   F   51   G</p> <p>4 902011 771114</p> <p>《伝》アデントヒルツッキPフツウ51G<br/>《I》1 4902011 771111<br/>《品》20773111</p> <p>個装人数 51枚 ケース人数 6パック<br/>【個装】 270×325×146mm 1,881g<br/>【ケース】 570×451×346mm 12.5kg</p> <p>希望小売価格 -<br/>商品仕様  28×49cm</p> |

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。  
★品質管理番号一印字・段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。  
★品質管理番号一印字・段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

|   |
|---|
| ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br>吸水パッド33cm180cc 14枚 <b>P24</b>   |
|   |
| ナチアサG180A14   |
|   |
| 4 902011 111200   |
| 《伝》ナチュラサ33cm180ccA14<br>《I》1 4902011 111207<br>《品》21000979<br>個装人数 14枚 ケース人数 16パック<br>【個装】214×165×104mm 316g<br>【ケース】415×451×339mm 5.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 33cm 180cc |

|   |
|---|
| ナチュラ 夜つけて朝あんしん<br>吸水パッド36cm210cc 12枚 <b>P24</b>   |
|   |
| ナチアサH210A12   |
|   |
| 4 902011 111224   |
| 《伝》ナチュラサ36cm210ccA12<br>《I》1 4902011 111221<br>《品》21000980<br>個装人数 12枚 ケース人数 16パック<br>【個装】213×165×103mm 307g<br>【ケース】410×449×354mm 5.6kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 36cm 210cc |

**中人用品**  
(子供用と大人用の中間サイズ)

|   |
|---|
| グーン スーパーBIGテープ止めタイプ<br>28枚 <b>P25</b>   |
|   |
| クーンSIB28  |
|   |
| 4 902011 745009   |
| 《伝》グーンスーパーBIG28/16A<br>《I》1 4902011 745006<br>《品》20753858<br>個装人数 28枚 ケース人数 4パック<br>【個装】353×269×190mm 1,770g<br>【ケース】368×550×400mm 8.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 15~35kg<br>ウエストまわり 50~70cm |

|  |
|--|
| グーン スーパーBIGパンツタイプ<br>14枚 <b>P25</b>  |
|  |
| クーンSBI14   |
|  |
| 4 902011 743081  |
| 《伝》グーンスーパーBIGP14/16A<br>《I》1 4902011 743088<br>《品》20753859<br>個装人数 14枚 ケース人数 6パック<br>【個装】210×255×196mm 818g<br>【ケース】439×610×280mm 6.0kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 15~35kg<br>ウエストまわり 50~70cm |

|   |
|---|
| グーン スーパーBIG<br>安心吸水パッド 26枚 <b>P25</b>   |
|   |
| クーンSID26  |
|   |
| 4 902011 745269   |
| 《伝》グーンスーパーBIGPD26/16A<br>《I》1 4902011 745266<br>《品》20753860<br>個装人数 26枚 ケース人数 6パック<br>【個装】208×251×134mm 856g<br>【ケース】429×421×263mm 5.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 45cm 13.5×45cm |

**ベビー用品**

|   |
|---|
| グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ<br>新生児用 68枚 <b>P25</b>   |
|   |
| クーン+NB68  |
|   |
| 4 902011 115482   |
| 《伝》グーン+NB68/24B<br>《I》1 4902011 115489<br>《品》21001248<br>個装人数 68枚 ケース人数 4パック<br>【個装】336×320×124mm 1,222g<br>【ケース】357×515×340mm 6.0kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 ~5.0kg |

|  |
|--|
| グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ<br>新生児用 2枚 <b>P25</b>   |
|  |
| クーン+NB2  |
|  |
| 4 902011 842623  |
| 《伝》グーン+NB2/24B<br>《I》1 4902011 842620<br>《品》21001272<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】230×145×32mm 39g<br>【ケース】262×411×276mm 1.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 ~5.0kg |

|  |
|--|
| グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ<br>Sサイズ 2枚 <b>P25</b>   |
|  |
| クーン+S2   |
|  |
| 4 902011 842630  |
| 《伝》グーン+S2/24B<br>《I》1 4902011 842637<br>《品》21001273<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】250×145×33mm 43g<br>【ケース】262×471×276mm 2.0kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 4.0~8.0kg |

|   |
|---|
| グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ<br>Mサイズ 2枚 <b>P25</b>  |
|   |
| クーン+M2  |
|   |
| 4 902011 842647   |
| 《伝》グーン+M2/24B<br>《I》1 4902011 842644<br>《品》21001274<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】260×145×33mm 55g<br>【ケース】249×486×306mm 2.4kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 6.0~11kg |

|  |
|--|
| グーンプラス やわらかタッチ パンツ<br>Mサイズ 2枚 <b>P25</b>   |
|  |
| クーン+PM2  |
|  |
| 4 902011 842722  |
| 《伝》グーン+パンツM2/24B<br>《I》1 4902011 842729<br>《品》21001275<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】280×180×27mm 60g<br>【ケース】305×510×321mm 2.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 6.0~12kg |

|  |
|--|
| グーンプラス やわらかタッチ<br>パンツ Lサイズ 2枚 <b>P25</b>   |
|  |
| クーン+PL2  |
|  |
| 4 902011 842739  |
| 《伝》グーン+パンツL2/24B<br>《I》1 4902011 842736<br>《品》21001276<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】295×180×32mm 70g<br>【ケース】295×520×321mm 3.1kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 9.0~14kg |

|   |
|---|
| グーンプラス やわらかタッチ<br>パンツ BIGサイズ 2枚 <b>P25</b>  |
|   |
| クーン+PB2   |
|   |
| 4 902011 842746   |
| 《伝》グーン+パンツB2/24B<br>《I》1 4902011 842743<br>《品》21001277<br>個装人数 2枚 ケース人数 36パック<br>【個装】285×180×32mm 70g<br>【ケース】295×530×321mm 3.3kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 体重大目安 12~22kg |

|  |
|--|
| グーンプラス 汚れすっきりおしりふき<br>60枚×3P <b>P25</b>  |
|  |
| GO+オシリフキ3P   |
|  |
| 4 902011 833782  |
| 《伝》グーン+オシリフキ3P/24A<br>《I》1 4902011 833789<br>《品》21001479<br>個装人数 180枚 ケース人数 12パック<br>【個装】150×150×110mm 904g<br>【ケース】300×475×226mm 11.4kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 13×19cm |

|   |
|---|
| グーン 肌にやさしいおしりふき<br>70枚×3P <b>P25</b>  |
|   |
| クーンオシリエフキ3P   |
|   |
| 4 902011 831900   |
| 《伝》GOハグオシリエフキ70*3P/22B<br>《I》1 4902011 831907<br>《品》21000520<br>個装人数 210枚 ケース人数 12パック<br>【個装】111×145×110mm 779g<br>【ケース】230×475×226mm 9.8kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 13×18cm |

**清拭用品**

|   |
|---|
| アテント ふきとりぬれタオル<br>70枚 <b>P23</b>  |
|   |
| アテントフキトリ70  |
|   |
| 4 902011 731347   |
| 《伝》アテントフキトリヌレタオル70<br>《I》1 4902011 731344<br>《品》20833046<br>個装人数 70枚 ケース人数 12パック<br>【個装】50×290×105mm 474g<br>【ケース】173×490×230mm 6.2kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 22×20cm |

|   |
|---|
| アテント からだふき<br>30枚 <b>P23</b>  |
|   |
| アテントカラダフキ30   |
|   |
| 4 902011 730227   |
| 《伝》アテントカラダフキ30<br>《I》1 4902011 730224<br>《品》20833173<br>個装人数 30枚 ケース人数 12パック<br>【個装】70×240×110mm 442g<br>【ケース】220×370×235mm 5.7kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 30×30cm |

|  |
|--|
| アテント 温められるからだふき<br>超大判・個包装タイプ 25本 <b>P23</b>   |
|  |
| アテントWコンウ25   |
|  |
| 4 902011 733273  |
| 《伝》アテントウェットコホソウフクロ25<br>《I》1 4902011 733270<br>《品》20733784<br>個装人数 25枚 ケース人数 6パック<br>【個装】190×170×75mm 525g<br>【ケース】260×335×210mm 3.6kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 30×60cm |

|  |
|--|
| アテント 流せるおしりふき<br>無香料 72枚 <b>P23</b>  |
|  |
| A T ナカ オシリ M 72  |
|  |
| 4 902011 733594  |
| 《伝》アテントナガセルオシリフキM72<br>《I》1 4902011 733591<br>《品》20833064<br>個装人数 72枚 ケース人数 12パック<br>【個装】50×245×110mm 357g<br>【ケース】235×345×200mm 4.6kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 18×20cm |

|   |
|---|
| アテント 流せるおしりふき<br>やさしいせっけんの香り 72枚 <b>P23</b>   |
|   |
| A T ナカ オシリ S 72   |
|   |
| 4 902011 733600   |
| 《伝》アテントナガセルオシリフキセッケン72<br>《I》1 4902011 733607<br>《品》20833065<br>個装人数 72枚 ケース人数 12パック<br>【個装】50×245×110mm 357g<br>【ケース】235×345×200mm 4.6kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 18×20cm |

|  |
|--|
| アテントSケア すすぎがいらぬ洗浄液<br>350ml <b>P22</b>   |
|  |
| A T S オシリ 350  |
|  |
| 4 902011 737530  |
| 《伝》アテントSケアオシリセンジョウ350<br>《I》1 4902011 737537<br>《品》20733753<br>個装人数 350ml ケース人数 6本<br>【個装】184×62×62mm 450g<br>【ケース】200×201×136mm 2.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 化粧品 |

|   |
|---|
| アテントSケア すすぎがいらぬ洗浄液<br>1,000ml <b>P22</b>  |
|   |
| A T S オシリ 1000  |
|   |
| 4 902011 737547   |
| 《伝》アテントSケアオシリセンジョウ1000<br>《I》1 4902011 737544<br>《品》20733754<br>個装人数 1,000ml ケース人数 6本<br>【個装】237×88×88mm 1,229g<br>【ケース】256×282×190mm 8.0kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 化粧品 |

|   |
|---|
| エリエール<br>ふんわり吸水タオル 50枚 <b>P23</b>   |
|   |
| E キュウスイ タオル 50  |
|   |
| 4 902011 703740   |
| 《伝》エリエールフワリキュウスイタオル50<br>《I》1 4902011 703747<br>《品》20703374<br>個装人数 50枚 ケース人数 24パック<br>【個装】125×190×142mm 292.5g<br>【ケース】355×600×400mm 7.9kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 375×280mm |

|   |
|---|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E50 ホワイト包装50 <b>P23</b>  |
|   |
| E フ ロスト E 50 ホワイ  |
|   |
| 4 902011 704280   |
| 《伝》EプロワイブストロングE50ホワイト<br>《I》1 4902011 704287<br>《品》20703428<br>個装人数 50枚 ケース人数 18パック<br>【個装】100×205×140mm 294g<br>【ケース】300×448×430mm 6.1kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 405×280mm |

|   |
|---|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E50 ハンディ100 <b>P23</b>   |
|   |
| E フ ロスト E 50 ハン   |
|   |
| 4 902011 704297   |
| 《伝》EプロワイブストロングE50ハン<br>《I》1 4902011 704294<br>《品》20703429<br>個装人数 100枚 ケース人数 16パック<br>【個装】90×250×105mm 237g<br>【ケース】350×440×250mm 4.2kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 198×230mm |

|  |
|--|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E40 ホワイト包装50 <b>P23</b>   |
|  |
| E フ ロスト E 40 ホ   |
|  |
| 4 902011 824919  |
| 《伝》EプロストロングE40Wホワイト50<br>《I》1 4902011 824916<br>《品》20823491<br>個装人数 50枚 ケース人数 24パック<br>【個装】80×205×150mm 237g<br>【ケース】305×448×430mm 6.6kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 405×280mm |

|   |
|---|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E60 ホワイト 折り包装50 <b>P23</b>   |
|   |
| E フ ロスト E 60 ホワイ  |
|   |
| 4 902011 621662   |
| 《伝》EプロワイブストロングE60ホワイト<br>《I》010 4902011 621661<br>《品》20623166<br>個装人数 50枚 ケース人数 18パック<br>【個装】100×205×140mm 347g<br>【ケース】300×448×430mm 7.2kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 405×280mm |

|   |
|---|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E60 ハンディ100 <b>P23</b>   |
|   |
| E スト E 60 ハン 100  |
|   |
| 4 902011 622379   |
| 《伝》EプロストロングE60ハンディ100<br>《I》010 4902011 622378<br>《品》20623237<br>個装人数 100枚 ケース人数 16パック<br>【個装】85×105×250mm 282g<br>【ケース】350×440×250mm 5.0kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 198×230mm |

|  |
|--|
| エリエールプロワイブ<br>ストロングタオル E70 ホワイト折り包装340×350 <b>P23</b>  |
|  |
| E P スト E 70 W 3 4 0  |
|  |
| 4 902011 826166  |
| 《伝》EプロストロングE70ホワイト340<br>《I》1 4902011 826163<br>《品》20823616<br>個装人数 50枚 ケース人数 18パック<br>【個装】90×178×173mm 427g<br>【ケース】279×551×371mm 8.5kg<br>希望小売価格 —<br>商品仕様 340×350mm |

**ハウスホールドケア用品**

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。  
※品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。  
©Disney ©Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>エリエール 薬用 消毒できるアルコールタール<br/>本体 80枚 <b>P26</b></p>  <p>※指定医薬部外品</p> <p>Eシヨウトクホン810</p> <p>4 902011 733150</p> <p>《伝》 Eシヨウトクボトルホンタイ80マイ<br/>《I》 I 4902011 733157<br/>《品》 20833116<br/>個装入数 80枚 ケース入数 12個<br/>【個装】 177×114×114mm 477g<br/>【ケース】 192×467×355mm 6.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 15×20cm</p> | <p>エリエール 薬用 消毒できるアルコールタール<br/>つめかえ用 70枚 <b>P26</b></p>  <p>※指定医薬部外品</p> <p>Eシヨウトクカエ710</p> <p>4 902011 733167</p> <p>《伝》 Eシヨウトクボトルツメカエ70マイ<br/>《I》 I 4902011 733164<br/>《品》 20833117<br/>個装入数 70枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 180×100×50mm 334g<br/>【ケース】 170×475×300mm 8.2kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 15×20cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ボトル本体 100枚 <b>P26</b></p>  <p>Eシヨキンホン1010</p> <p>4 902011 731118</p> <p>《伝》 エリエールジョキンホンタイ100マイ<br/>《I》 I 4902011 731115<br/>《品》 (現)21001072/(新)21001601<br/>個装入数 100枚 ケース入数 12個<br/>【個装】 151×114×114mm 399g<br/>【ケース】 170×467×355mm 5.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ボトルつめかえ用 80枚 <b>P26</b></p>  <p>Eシヨキンツメカエ810</p> <p>4 902011 731125</p> <p>《伝》 エリエールジョキンツメカエ80マイ<br/>《I》 I 4902011 731122<br/>《品》 (現)21000182/(新)21001602<br/>個装入数 80枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 142×78×64mm 250g<br/>【ケース】 147×407×333mm 6.6kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> |
|---|---|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>エルヴェール トイレティッシュ<br/>シングル 65m 個包装 (ミシン目入り) <b>P27</b></p>  <p>エルウTPI100*09</p> <p>4 902011 612233</p> <p>《伝》 エルヴェールTPI100R65*09<br/>《I》 I 010 4902011 612232<br/>《品》 20723085<br/>個装入数 1ロール ケース入数 100パック<br/>【個装】 118×106×106mm 156g<br/>【ケース】 476×540×540mm 16.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 114mm×65m</p> | <p>エルヴェール トイレティッシュ<br/>シングル 100m 個包装 (ミシン目入り) <b>P27</b></p>  <p>エルウTPI80*09</p> <p>4 902011 612240</p> <p>《伝》 エルヴェールTPI80R100*09<br/>《I》 I 010 4902011 612249<br/>《品》 20723086<br/>個装入数 1ロール ケース入数 80パック<br/>【個装】 117×115×115mm 219g<br/>【ケース】 476×591×475mm 18.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 114mm×100m</p> | <p>エルヴェール トイレティッシュ<br/>シングル 170m 個包装 (芯なし) <b>P27</b></p>  <p>エルウTPI170*09</p> <p>4 902011 618297</p> <p>《伝》 エルヴェールTPI48R170*09<br/>《I》 I 010 4902011 618296<br/>《品》 20723088<br/>個装入数 1ロール ケース入数 48パック<br/>【個装】 113×114×114mm 290g<br/>【ケース】 342×454×454mm 14.9kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 107mm×170m</p> | <p>エルヴェール トイレティッシュ<br/>シングル 170m 6R (芯なし) <b>P27</b></p>  <p>エルウE6RS170</p> <p>4 902011 722826</p> <p>《伝》 エルヴェールTPI170M6R23<br/>《I》 I 4902011 722823<br/>《品》 21000745<br/>個装入数 6ロール ケース入数 8パック<br/>【個装】 321×225×113mm 1,700g<br/>【ケース】 337×454×454mm 14.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 107mm×170m</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>大容量 本体 400枚 <b>P26</b></p>  <p>EシヨキALホン4100</p> <p>4 902011 731163</p> <p>《伝》 Eジョキンアルコールホンタイ400マイ<br/>《I》 I 4902011 731160<br/>《品》 21000966<br/>個装入数 400枚 ケース入数 6個<br/>【個装】 195×195×195mm 1,429g<br/>【ケース】 208×608×408mm 9.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 14×19cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>大容量 つめかえ用 400枚 <b>P26</b></p>  <p>EシヨキALカエ4100</p> <p>4 902011 731170</p> <p>《伝》 Eジョキンアルコールツメカエ400マイ<br/>《I》 I 4902011 731177<br/>《品》 21000967<br/>個装入数 400枚 ケース入数 8パック<br/>【個装】 145×160×160mm 1,174g<br/>【ケース】 155×590×330mm 10.1kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 14×19cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ウイルス除去用 ボトル本体 80枚 <b>P26</b></p>  <p>Eシヨウイルスホン810</p> <p>4 902011 731149</p> <p>《伝》 Eジョキンウイルスホンタイ80マイ<br/>《I》 I 4902011 731146<br/>《品》 (現)21001073/(新)21001605<br/>個装入数 80枚 ケース入数 12個<br/>【個装】 151×114×114mm 338g<br/>【ケース】 170×467×355mm 4.5kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ウイルス除去用 ボトルつめかえ用 70枚 <b>P26</b></p>  <p>Eシヨウイルスカエ710</p> <p>4 902011 731156</p> <p>《伝》 Eジョキンウイルスツメカエ70マイ<br/>《I》 I 4902011 731153<br/>《品》 (現)21000186/(新)21001606<br/>個装入数 70枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 142×78×64mm 219g<br/>【ケース】 147×407×328mm 5.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> |
|--|--|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>エルヴェール トイレティッシュ<br/>シングル 200m 6R (芯なし) <b>P27</b></p>  <p>エルウE6RS2100</p> <p>4 902011 722734</p> <p>《伝》 エルヴェールTPI200M6R<br/>《I》 I 4902011 722731<br/>《品》 21000693<br/>個装入数 6ロール ケース入数 8パック<br/>【個装】 321×225×113mm 1,999g<br/>【ケース】 406×615×454mm 16.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 107mm×200m</p> | <p>エリエール ペーパータオル<br/>ダブル 200組400枚 (中判) <b>P26</b></p>  <p>EタオールデュウW2100</p> <p>4 902011 614145</p> <p>《伝》 エリエールタオルデュウパンW200<br/>《I》 I 010 4902011 614144<br/>《品》 20703169<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 70×210×115mm 467g<br/>【ケース】 406×615×230mm 14.6kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エリエール ペーパータオルスマートタイプ<br/>シングル 200枚 (中判) <b>P26</b></p>  <p>Eスマート2100デュウS</p> <p>4 902011 703337</p> <p>《伝》 エリエールスマートタイプデュウ200S<br/>《I》 I 4902011 703334<br/>《品》 20703333<br/>個装入数 200枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 70×210×115mm 295g<br/>【ケース】 395×615×230mm 9.6kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エリエール ペーパータオルスマートタイプ<br/>シングル 200枚 (小判) <b>P26</b></p>  <p>EスマートシW2100</p> <p>4 902011 703610</p> <p>《伝》 エリエールスマートショウS200/15<br/>《I》 I 4902011 703617<br/>《品》 20703361<br/>個装入数 200枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】 70×210×85mm 218g<br/>【ケース】 381×634×225mm 9.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×210mm</p> |
|--|--|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ウイルス除去用 大容量本体 320枚 <b>P26</b></p>  <p>EシヨキWIホン3120</p> <p>4 902011 731187</p> <p>《伝》 Eジョキンウイルスホンタイ320マイ<br/>《I》 I 4902011 731184<br/>《品》 21000968<br/>個装入数 320枚 ケース入数 6個<br/>【個装】 195×195×195mm 1,179g<br/>【ケース】 208×608×408mm 8.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 14×19cm</p> | <p>エリエール 除菌できるアルコールタール<br/>ウイルス除去用 大容量つめかえ用 320枚 <b>P26</b></p>  <p>EシヨキWIKカエ3120</p> <p>4 902011 731194</p> <p>《伝》 Eジョキンウイルスツメカエ320マイ<br/>《I》 I 4902011 731191<br/>《品》 21000969<br/>個装入数 320枚 ケース入数 8パック<br/>【個装】 145×150×125mm 927g<br/>【ケース】 155×555×300mm 8.2kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 14×19cm</p> | <p>エリエール 超除菌できるアルコールタール<br/>パワープラス ボトル本体 70枚 <b>P26</b><br/><b>新商品</b></p>  <p>チヨウシヨキンホン710</p> <p>4 902011 119879</p> <p>《伝》 Eチヨウジョキンパワー+ホンタイ70<br/>《I》 I 4902011 119876<br/>《品》 21001649<br/>個装入数 70枚 ケース入数 12個<br/>【個装】 151×114×114mm 385g<br/>【ケース】 170×467×355mm 5.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> | <p>エリエール 超除菌できるアルコールタール<br/>パワープラス ボトルつめかえ用 60枚 <b>P26</b><br/><b>新商品</b></p>  <p>チヨウシヨキンカエ610</p> <p>4 902011 120226</p> <p>《伝》 Eチヨウジョキンパワー+カエ60マイ<br/>《I》 I 4902011 120223<br/>《品》 21001650<br/>個装入数 60枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 142×78×64mm 255g<br/>【ケース】 147×407×328mm 6.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 13×20cm</p> |
|--|--|--|---|

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>エリエール ペーパータオル<br/>スマートタイプ ダブル 200組400枚 (中判) <b>P26</b></p>  <p>EスマートデュウW2100</p> <p>4 902011 115406</p> <p>《伝》 EスマートタイプデュウW200/24<br/>《I》 I 4902011 115403<br/>《品》 21001287<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 50パック<br/>【個装】 61×210×115mm 283g<br/>【ケース】 295×610×446mm 15.5kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エリエール ペーパータオル<br/>スマートタイプ ダブル 200組400枚 (小判) <b>P26</b></p>  <p>EスマートシW2100</p> <p>4 902011 115413</p> <p>《伝》 EスマートタイプデュウW200/24<br/>《I》 I 4902011 115410<br/>《品》 21001288<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】 58×210×85mm 209g<br/>【ケース】 313×634×229mm 9.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エリエール ペーパータオルスマートタイプ<br/>無漂白シングル 200枚 (中判) <b>P26</b></p>  <p>Eリエスマチミサ2100S</p> <p>4 902011 705133</p> <p>《伝》 EスマートミザラシデュウS200/18<br/>《I》 I 4902011 705130<br/>《品》 20703513<br/>個装入数 200枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 70×210×115mm 292g<br/>【ケース】 390×615×230mm 9.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エリエール ペーパータオルスマートタイプ<br/>無漂白シングル 200枚 (小判) <b>P26</b></p>  <p>EスマミサシW2100</p> <p>4 902011 705140</p> <p>《伝》 EスマートミザラシデュウS200/18<br/>《I》 I 4902011 705147<br/>《品》 20703514<br/>個装入数 200枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】 70×210×85mm 216g<br/>【ケース】 411×634×225mm 9.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×210mm</p> |
|---|---|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>マスク</b></p>  | <p>エリエール サージカルマスク<br/>ふつうサイズ 50枚 <b>P26</b></p>  <p>Eサーシカルフツウ510</p> <p>4 902011 830682</p> <p>《伝》 エリエールサージカルマスクフツウ50<br/>《I》 I 4902011 830689<br/>《品》 21001201<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 165×200×105mm 226.4g<br/>【ケース】 420×515×440mm 6.5kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 約175×90mm</p> | <p>エリエール サージカルマスク<br/>スマートタイプふつうサイズ 50枚 <b>P26</b></p>  <p>EサーシSフツウ510</p> <p>4 902011 832921</p> <p>《伝》 Eサージカルマスクスマートフツウ50<br/>《I》 I 4902011 832928<br/>《品》 21001202<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】 165×200×105mm 219.2g<br/>【ケース】 420×515×440mm 6.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 約175×90mm</p> |
|   | <p><b>業務用紙製品</b></p>  |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>エルフォーレ ペーパータオル<br/>ダブル 150組300枚 (大判) <b>P27</b></p>  <p>エルフ150Wミルク06</p> <p>4 902011 619683</p> <p>《伝》 エルフォーレタオルWオ150ミルク06<br/>《I》 I 010 4902011 619682<br/>《品》 20623041<br/>個装入数 150組300枚 ケース入数 25パック<br/>【個装】 55×248×115mm 328g<br/>【ケース】 250×615×265mm 8.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×248mm</p> | <p>エルフォーレ ペーパータオル<br/>ダブル 200組400枚 (中判) <b>P27</b></p>  <p>エルフ200Wミルク06</p> <p>4 902011 619690</p> <p>《伝》 エルフォーレタオルWデュウ200ミルク06<br/>《I》 I 010 4902011 619699<br/>《品》 20623043<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 65×210×115mm 371g<br/>【ケース】 377×615×230mm 12.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオルエコ<br/>シングル 200枚 (中判) <b>P27</b></p>  <p>エルウEエコチ2100</p> <p>4 902011 619621</p> <p>《伝》 エルヴェールエコデュウS200/23<br/>《I》 I 010 4902011 619620<br/>《品》 21000694<br/>個装入数 200枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 74×220×115mm 357g<br/>【ケース】 428×610×231mm 11.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×220mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオルエコ<br/>ダブル 200組400枚 (中判) <b>P27</b></p>  <p>エルウEエコデュウ2100</p> <p>4 902011 702071</p> <p>《伝》 エルヴェールエコデュウ200Wデュウ<br/>《I》 I 4902011 702078<br/>《品》 21001454<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】 72×210×115mm 352g<br/>【ケース】 415×615×230mm 11.2kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> |
|---|--|---|--|

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>エルヴェール ペーパータオルエコ シングル 200枚(小判) P27</p> <p>エルウ エエコシS200</p> <p>4 902011 703634</p> <p>《伝》エルヴェールエコショウS200/23<br/>《I》1 4902011 703631<br/>《品》21000696<br/>個装入数 200枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】74×220×85mm 264g<br/>【ケース】414×634×231mm 11.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×220mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオルエコ ダブル 200組400枚(小判) P27</p> <p>エルウ エエコシW200</p> <p>4 902011 703641</p> <p>《伝》エルヴェールエコショウW200/15<br/>《I》1 4902011 703648<br/>《品》20703364<br/>個装入数 200組400枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】72×210×85mm 261g<br/>【ケース】381×634×225mm 11.6kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×210mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオルエコスマート シングル 200枚(中判) P27</p> <p>エルウ エコSチ200S</p> <p>4 902011 705102</p> <p>《伝》エルヴェエコスマートチS200/23<br/>《I》1 4902011 705109<br/>《品》21000697<br/>個装入数 200枚 ケース入数 35パック<br/>【個装】61×210×115mm 282g<br/>【ケース】401×610×226mm 10.5kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×210mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオルエコスマート シングル 200枚(小判) P27</p> <p>エルウ エスマンS200</p> <p>4 902011 705119</p> <p>《伝》エルヴェエコスマートシS200/23<br/>《I》1 4902011 705116<br/>《品》21000698<br/>個装入数 200枚 ケース入数 42パック<br/>【個装】61×210×85mm 209g<br/>【ケース】401×610×226mm 9.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×210mm</p> |
|--|---|---|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>エルヴェール ペーパータオル クリア シングル 300枚 手のひらサイズ</p> <p>エルウ エクリア300</p> <p>4 902011 112726</p> <p>《伝》エルヴェールタオルクリア300マイ<br/>《I》1 4902011 112723<br/>《品》21001070<br/>個装入数 300枚 ケース入数 20パック<br/>【個装】79×180×115mm 338g<br/>【ケース】305×610×201mm 7.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 230×180mm</p> | <p>エルヴェール ペーパータオル クリア シングル 300枚 手のひらサイズミニ</p> <p>エルウ エクリア300ミ</p> <p>4 902011 112733</p> <p>《伝》エルヴェールタオルクリア300ミニ<br/>《I》1 4902011 112730<br/>《品》21001071<br/>個装入数 300枚 ケース入数 35パック<br/>【個装】79×180×85mm 250g<br/>【ケース】365×634×201mm 9.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 170×180mm</p> | <p>エリエール プロワイプ ロールトクロス M100</p> <p>EローリントクM100</p> <p>4 902011 703221</p> <p>《伝》EプロローリントクロスM100/21<br/>《I》1 4902011 703228<br/>《品》20823443<br/>個装入数 100枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】110×130×130mm 194g<br/>【ケース】349×666×288mm 6.6kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 250×250mm</p> | <p>エリエール プロワイプ コットンRクロス M100</p> <p>EコットRクロスM100</p> <p>4 902011 622218</p> <p>《伝》EプロコットRクロスM100<br/>《I》010 4902011 622217<br/>《品》20623221<br/>個装入数 100枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】120×128×126mm 191g<br/>【ケース】369×646×266mm 6.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 250×250mm</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>エリエール プロワイプ コットンRクロス S100</p> <p>EコットRクロスS100</p> <p>4 902011 622478</p> <p>《伝》EプロコットRクロスS100<br/>《I》010 4902011 622477<br/>《品》20623247<br/>個装入数 100枚 ケース入数 30パック<br/>【個装】125×113×100mm 138g<br/>【ケース】369×611×231mm 4.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 200×225mm</p> | <p>エリエール プロワイプ ソフトタオル 未晒帯どめ50</p> <p>フロミサ50/18</p> <p>4 902011 621617</p> <p>《伝》Eプロワイプソフトミザ50/18<br/>《I》010 4902011 621616<br/>《品》20703523<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】130×205×158mm 493g<br/>【ケース】405×660×430mm 13.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 405×315mm</p> | <p>エリエール プロワイプ ソフトタオル ホワイト 帯どめ50</p> <p>FSエリフプロホワイト50</p> <p>4 902011 621624</p> <p>《伝》FSエリエプロワイプSホワイト50<br/>《I》010 4902011 621623<br/>《品》20703144<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】115×206×158mm 496g<br/>【ケース】365×660×430mm 13.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 405×315mm</p> | <p>エリエール プロワイプ ソフトタオル ホワイト ポリ包装50</p> <p>FSフプロホワイトポリ50</p> <p>4 902011 621631</p> <p>《伝》FSエリエプロワイプSホワイトポリ50<br/>《I》010 4902011 621630<br/>《品》20703145<br/>個装入数 50枚 ケース入数 18パック<br/>【個装】115×205×158mm 497g<br/>【ケース】370×500×430mm 9.9kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 405×315mm</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>エリエールプロワイプ ソフトタオル 未晒帯どめ50</p> <p>Eフプロタフミサ50</p> <p>4 902011 703566</p> <p>《伝》Eプロワイプソフトタフミザ50<br/>《I》1 4902011 703563<br/>《品》20703356<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】136×192×142mm 362g<br/>【ケース】418×585×395mm 9.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 380×280mm</p> | <p>エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ポリ包装50</p> <p>EフプロSWヤワホ50</p> <p>4 902011 823547</p> <p>《伝》EプロワイプSWヤワホポリ50<br/>《I》1 4902011 823544<br/>《品》20823354<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】135×200×158mm 360g<br/>【ケース】405×660×430mm 9.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 400×315mm</p> | <p>エリエール プロワイプ リサイクルタオル 帯どめ4枚重ね50</p> <p>エリフプロリサイクル50</p> <p>4 902011 621600</p> <p>《伝》エリエプロワイプリサイクル50マイ<br/>《I》010 4902011 621609<br/>《品》20703149<br/>個装入数 50枚 ケース入数 24パック<br/>【個装】115×205×158mm 496g<br/>【ケース】365×660×430mm 13.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 405×315mm</p> | <p>超吸収キッチンタオル マルチクロス Sサイズ 80枚</p> <p>EマルチS80R</p> <p>4 902011 117660</p> <p>《伝》EチヨウキョウマルチクロスS80R24<br/>《I》1 4902011 117667<br/>《品》21001374<br/>個装入数 80枚 ケース入数 25パック<br/>【個装】90×250×105mm 192g<br/>【ケース】470×550×250mm 5.3kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 198×230mm</p> |
|--|--|--|--|

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>超吸収キッチンタオル マルチクロス Mサイズ 50枚</p> <p>EマルチクロスM50</p> <p>4 902011 117653</p> <p>《伝》EチヨウキョウマルチクロスM50R24<br/>《I》1 4902011 117650<br/>《品》21001373<br/>個装入数 50枚 ケース入数 18パック<br/>【個装】110×205×140mm 294g<br/>【ケース】330×448×430mm 5.8kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 405×280mm</p> | <p>エリエール ディスペンサー 小判M</p> <p>EティイスコハンM</p> <p>4 902011 799934</p> <p>《伝》EディスペンサーコバンM<br/>《I》1 4902011 799931<br/>《品》20793902<br/>個装入数 1個 ケース入数 6個<br/>【個装】220×263×119mm 738g<br/>【ケース】383×542×236mm 5.0kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 210×250×106mm</p> | <p>エリエール ディスペンサー 小判L</p> <p>EティイスコハンL</p> <p>4 902011 799927</p> <p>《伝》EディスペンサーコバンL<br/>《I》1 4902011 799924<br/>《品》20793903<br/>個装入数 1個 ケース入数 6個<br/>【個装】266×305×119mm 919g<br/>【ケース】286×626×380mm 6.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 292×250×106mm</p> | <p>エリエール ディスペンサー 中判M</p> <p>EティイスチュウハンM</p> <p>4 902011 799910</p> <p>《伝》EディスペンサーチュウバンM<br/>《I》1 4902011 799917<br/>《品》20793904<br/>個装入数 1個 ケース入数 6個<br/>【個装】220×263×148mm 779g<br/>【ケース】240×542×467mm 5.4kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 210×250×135mm</p> |
|---|--|--|--|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>エリエール ディスペンサー 中判L</p> <p>EティイスチュウハンL</p> <p>4 902011 799897</p> <p>《伝》EディスペンサーチュウバンL<br/>《I》1 4902011 799894<br/>《品》20793905<br/>個装入数 1個 ケース入数 6個<br/>【個装】266×305×148mm 972g<br/>【ケース】286×626×466mm 6.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 292×250×135mm</p> | <p>エリエール ディスペンサー 卓上用 小判 IP</p> <p>EティイスタクシヨIP</p> <p>4 902011 799248</p> <p>《伝》EディスペンサータクジョウシP<br/>《I》1 4902011 799245<br/>《品》20793924<br/>個装入数 1個 ケース入数 1個<br/>【個装】220×152×263mm 730g<br/>【ケース】220×152×263mm 0.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 202×243×134mm</p> | <p>エルヴェールペーパータオルエコスマート オートディスペンサー用ロールタイプ(190m)</p> <p>EエコスマートR190</p> <p>4 902011 702453</p> <p>《伝》エルヴェエコスマートロールタオル190M<br/>《I》1 4902011 702450<br/>《品》21000750<br/>個装入数 1ロール ケース入数 9本<br/>【個装】200×146×146mm 1.107g<br/>【ケース】445×445×215mm 10.7kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 200mm×190m</p> | <p>エリエール ディスペンサーswingホワイト中判・小判兼用</p> <p>EティイスSWINGシロ</p> <p>4 902011 799279</p> <p>《伝》EディスペンサーSWINGホワイト<br/>《I》1 4902011 799276<br/>《品》20793927<br/>個装入数 1個 ケース入数 8個<br/>【個装】165×265×123mm 710g<br/>【ケース】345×505×280mm 6.2kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 140×254×107mm</p> |
|--|---|--|--|

|   |
|---|
| <p>エリエール ディスペンサー 卓上用ペーパータオル中判・小判兼用</p> <p>Eティイスタクケンヨウ</p> <p>4 902011 114454</p> <p>《伝》Eディスペンサータクジョウケンヨウ<br/>《I》1 4902011 114454<br/>《品》21001184<br/>個装入数 1個 ケース入数 1個<br/>【個装】243×273×184mm 635g<br/>【ケース】270×280×195mm 0.9kg<br/>希望小売価格 —<br/>商品仕様 —</p> |
|---|

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。  
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

# 2025年春 新商品・リニューアル品一覧 (寸法変更を含む)

| 2025年春 廃番商品                 |  |      |                 |
|-----------------------------|--|------|-----------------|
| JANコード                      | 商品名                                      | 商品画像 |                 |
| 4 902011 831436<br>21001074 | エリエール 除菌できるアルコールタオル<br>抗菌成分プラス 本体80枚     |      | 廃番              |
| 4 902011 831443<br>21000190 | エリエール 除菌できるアルコールタオル<br>抗菌成分プラス つめかえ用 70枚 |      | 廃番              |
| 4 902011 843927<br>20843392 | グリーンプラス<br>低出生体重児用 フラットタイプ 30枚           |      | 廃番              |
| 4 902011 843910<br>20843391 | グリーンプラス<br>低出生体重児用5S 30枚                 |      | 廃番              |
| 4 902011 843903<br>20843390 | グリーンプラス<br>低出生体重児用4S 30枚                 |      | 廃番              |
| 4 902011 842142<br>21000112 | グリーンプラス 敏感肌設計<br>うまれてすぐの赤ちゃん用3S 36枚      |      | 廃番              |
| 4 902011 761054<br>21001177 | アテント<br>テープ止めタイプ L 17枚 業務用               |      | リニューアル<br>による廃番 |
| 4 902011 768985<br>20763898 | アテント Sケア 長時間安心パッド<br>ダブルブロックタイプ 36枚 業務用  |      | リニューアル<br>による廃番 |

| 2025年春 新商品・リニューアル品          |   |      |  |
|-----------------------------|---|------|--|
| JANコード                      | 商品名   | 商品画像 |  |
| 4 902011 119879<br>21001649 | エリエール 超除菌できるアルコールタオル<br>パワープラス ボトル本体 70枚    |      |  |
| 4 902011 120226<br>21001650 | エリエール 超除菌できるアルコールタオル<br>パワープラス ボトルつめかえ用 60枚 |      |  |
| 4 902011 120219<br>21001634 | アテント<br>テープ止めタイプ L 20枚 業務用                  |      |  |
| 4 902011 119237<br>21001539 | アテント Sケア 長時間安心パッド<br>ダブルブロックタイプ 34枚 業務用     |      |  |

※パッケージデザインは変更になる可能性があります。  
©Disney