



現場の皆様の紙おむつでの お困りごとTOP3※

軟便・水様便 男性のモレ スキントラブル

※当社調べ

サンプル・商品のご案内

お申し込みはこちらへ

※お申し込みは、
病院・介護施設にお勤めの方を対象としています



https://jp.surveymonkey.com/r/attento_jahcc8



軟便・水様便

アテントSケア軟便安心パッド

軟便・水様便のモレ
肌への便付着を
軽減したい患者様へ

便を吸収体中に落とし込むことで、
皮膚への付着を低減します。


疑似便200g注入〈10分後〉

従来パッド



拡散面積 735cm²


Sケア軟便安心パッド

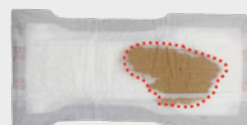

拡散面積 389cm²

※疑似便による実験 ※当社測定方法による

ダブル立体ギャザー

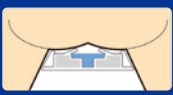

※イメージ図

拡散ポケット

男性のモレ

アテントSケア長時間安心パッド
ダブルブロックタイプ

男性のモレ

座位・側臥位でのモレを
軽減したい患者様へ

「ダブル立体ギャザー」で排尿をしっかり
キャッチ、「拡散ポケット」ですばやく
拡散吸収させることで、股間部や男性特
有の腹からのモレを軽減します。




スキントラブル

アテントSケア前側吸収
おしりさらさらパッド

尾骨・仙骨部への尿汚染を
防ぎたい患者様へ

排尿口付近で尿をスポット吸収することで、スキントラブルが
起こりやすい尾骨・仙骨部への尿拡散を軽減します。

※イメージ図

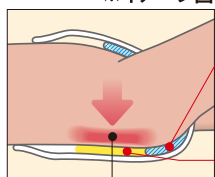

スキントラブルが
起りやすい部分
(尾骨・仙骨部)


前側吸収体ゾーン

排尿口付近で尿をスポット
吸収するので、体重がか
かりやすい部分の尿汚染
と逆流を防ぎます。

超うす吸収体ゾーン

体重がかかりやすい部分
のおむつの厚みを薄くし
ています。

おなか側

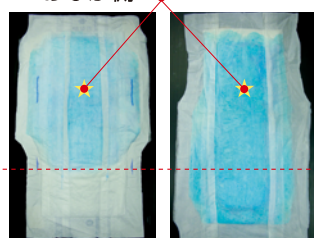

背中側

背中側

Sケア前側吸収
おしりさらさらパッド

従来パッド

※当社調べ

併用するテープタイプ



脚まわりのすき間を防ぐ、
アテントRケアスーパー
フィットテープがお勧めです。

お問い合わせ先

大王製紙株式会社 エリエールお客様相談室

☎0120-205205

(土・日・祝日を除く 9:30~16:30)